

## 12. Гарантийные обязательства

- 12.1 Гарантийный срок эксплуатации мебели – 12 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- 12.2 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: истечение срока гарантии; нарушение правил хранения и эксплуатации; наличие механических повреждений изделия по вине потребителя.
- Замена фурнитуры и деталей мебели, имеющих дефекты производственного характера, осуществляется при предъявлении гарантийного талона и упаковочных этикеток.
- За изделия с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.
- 12.3 Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 или по факсу (831) 216-20-51 или по электронной почте [otk@tdask.ru](mailto:otk@tdask.ru).

## 13. Сведения о производителе, свидетельство о приемке

Стул-тумба лабораторный СТ.01.00 изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2011 и признан годным для эксплуатации.

(штамп ОТК)

Серийный номер:

Дата выпуска изделия:

м.п.

Упаковщик:

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**  
Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород,  
ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.  
Место производства: 603147, г. Нижний Новгород,  
ул. Юлиуса Фучика, д.60.  
Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18  
E-mail: [zakaz@tdask.ru](mailto:zakaz@tdask.ru) [www.tdask.ru](http://www.tdask.ru)

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии 12 мес. с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты производства.

|   |                        |      |
|---|------------------------|------|
| Наименование изделия  | СТ.01.00 Стандарт (ПК) |      |
| Дата ввода в эксплуатацию   |                        |      |
| <b>Внимание! Действительным является только заполненный Гарантийный талон, заверенный печатью организации, вводящей изделие в эксплуатацию.</b> |                        | м.п. |

ООО Медицинская Компания



## Паспорт

Стол-тумба лабораторный серии Стандарт: СТ.01.00 (РК)



ТУ 9452-001-68690950-2011

г. Нижний Новгород

## 1. Введение

- 1.1 Настоящий паспорт является совмещённым документом с техническим описанием и руководством по эксплуатации.
- 1.2 Документ предназначен для ознакомления с медицинским изделием «Стол-тумба лабораторный» и устанавливает правила его эксплуатации (использования, технического обслуживания, транспортировки, хранения и т.д.).

## 2. Наименование и основные технические характеристики

| Арт.                      | Описание   | Габаритные размеры, мм |         |        | Масса, кг<br>не более |
|---------------------------|--|------------------------|---------|--------|-----------------------|
|                           |  | ширина                 | глубина | высота |                       |
| СТ.01.00<br>Стандарт (ПК) | Стол-тумба лабораторный.<br>два отделения с 4-мя ящиками,<br>отделение с дверью и полкой | 1500                   | 600     | 850    | 95                    |

- 2.1 Стол-тумба изготовлен из алюминиевого профиля и ЛДСП панелей, устанавливается на регулируемые опоры.

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий. Изображения в паспорте, иллюстрирующее внешний вид изделия и порядок его сборки – схематические и могут отличаться от реального вида.**

## 3. Назначение

- 3.1 Стол-тумба предназначен для оснащения диагностических лабораторий медицинских учреждений. Используется для хранения и размещения на его рабочей поверхности и внутри него - химических реактивов, лабораторной посуды, документов, инструментов и расходных материалов, медицинского инвентаря, аппаратуры, материалов для исследований, и манипуляций с ними.

## 4. Комплект поставки

| Наименование   | Кол-во, шт. |
|--|-------------|
| Стол-тумба в разобранном виде с комплектом фурнитуры | 1           |
| Паспорт  | 1           |
| Упаковка   | 1           |

## 10. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

- 10.1 Транспортировка должна производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Размещение и крепление упаковок в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.
- 10.2 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
- 10.3 Хранение должно производиться в отапливаемых и вентилируемых помещениях, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде.
- 10.4 Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений в соответствии со своим функциональным назначением.
- 10.5 Нормальные условия для хранения и эксплуатации мебели – температура воздуха от +10<sup>0</sup>С до +40<sup>0</sup>С при относительной влажности 45-70%.

**Рекомендуется:** размещать предметы внутри мебели, обеспечивая равномерное распределение нагрузки (по принципу тяжёлые – ближе к краям, лёгкие – по центру), нагружая многоярусные шкафы больше в нижних секциях для лучшей устойчивости, нагрузка на полку ЛДСП не более 5кг; во избежание перекосов дверей и ящиков держать их закрытыми; регулярно проверять прочность резьбовых соединений (в частности замков) и при необходимости подтягивать их; удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку дезинфицирующими средствами способом протирания (допускается использование раствора «Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в кол-ве 50г на 10л раствора); периодичность обработки – до 2-х раз в сутки.

**Не допускается:** механическое повреждение деталей мебели и попадание на их поверхность влаги, растворителей и химически активных веществ; хранение в сырых неотапливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие солнечных лучей; перемещение мебели без последующей регулировки её положения относительно пола.

## 11. Порядок осуществления утилизации

- 11.1 Изделие после окончания использования утилизируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации медицинских изделий.

## **7. Маркировка и упаковка**

7.1 Маркировка изделия соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и ТУ 9452-001-68690950-2011.

7.2 На изделии присутствует этикетка с указанием: наименования и товарного знака предприятия-изготовителя; обозначения ТУ; обозначения (артикула) изделия; месяца и года выпуска; серийного номера изделия.

7.3 Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и ТУ 9452-001-68690950-2011. Для транспортирования изделие упаковывается в короб из гофрокартона.

7.4 На транспортную тару нанесена маркировка, выполненная на бумажном ярлыке в соответствии с требованиями ГОСТ 14192, содержащая следующую информацию: наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; обозначение ТУ, наименование и обозначение (артикул) изделия; месяц и год выпуска; манипуляционные знаки указывающие на способ обращения с упакованным грузом; количество грузовых мест и порядковый номер места; масса брутто грузового места в килограммах; габаритные размеры грузового места в миллиметрах.

## **8. Подготовка к работе**

8.1 После транспортирования или хранения в условиях отрицательных температур изделие в транспортной таре должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 3 часов.

8.2 Распакуйте компоненты изделия, освободив его от упаковочного материала.

8.3 Проверьте целостность деталей изделия методом визуального осмотра.

## **9. Меры предосторожности (противопоказания)**

9.1 К сборке и эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт.

9.2 Запрещается использование изделия с механическими повреждениями.

9.3 Недопустимо использовать изделие не по назначению.


9.4 Побочные действия при применении по назначению не выявлены.

## 5. Сборка и техническое обслуживание

- 5.1 Распаковав изделие, внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис.1. Согласно позициям на схеме и комплектовочной ведомости определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку, гаечный ключ 12мм для регулировки опор, шуруповёрт.
- 5.2 В вертикальные стойки боковых и средних стенок [1,2,3,4] забейте заглушки (15,16) и вкрутите в них регулировочные опоры (17). При помощи рулетки разметьте вертикальные стойки для установки полкодержателей (18).  
Порядок установки - головку закладного винта ввести в паз профиля, поворотом полкодержателя зафиксировать его на стойке; шестигранным ключом затянуть соединение (усилие не должно быть чрезмерным, чтобы не деформировать стенки алюм. профиля).  
На боковой левой стенке [1] и средних стенках [3,4] шурупами 4x16 (26) закрепите направляющие выдвижных ящиков (25), таким образом, чтобы направл. выступала на 10мм относительно перед. края внутренней панели. В пазы ригелей [14] установите закладные площадки (21) для дверных петель (22). На двери [9] шурупами (26) закрепите поворотные петли (22) и ответную планку магнитной защёлки (23), установите ручку (28).
- 5.3 При помощи ригелей [14] соедините верт. стенки, предварительно установив в пазы верт. стоек и ригелей задние стенки [5,6].  
Для соединения ригеля со стойками – завести головки замков в пазы стоек; повернуть ригель с замками на  $90^{\circ}$  и, выровняв его по высоте, завернуть крепёжные винты замков.
- 5.4 Установите горизонтальную стенку [8] и зафиксируйте её шурупами с прессшайбой (19). Установите дверь [9]. Для этого потребуется ослабить крепление ригеля тумбы (с установленной закладной), сдвинуть его в пазах вертик. стоек, установить дверь и снова затянуть соединение. Шурупами (27) закрепите к горизонт. нижней стенке [8] магнитную защёлку (23) через подкладку (24). Крышку [7] установите при помощи металлических уголков (19), закрепив их саморезами с прессшайбой (19).
- 5.5 Установите стол на предназначенное для него место. Регулировкой опор обеспечьте устойчивое без перекосов положение стола. Отрегулируйте зазоры двери - ослабляя и затягивая после сдвига винты установочных площадок поворотных петель (21).
- 5.6 Сборка выдвижных ящиков. Схема сборки ящиков показана на рис.1. Шурупами 4x16 соедините заднюю стенку, днище ящика и его фасад с металлическими боковинами направляющего механизма. На фасад ящика установите ручку. Установите в стол-тумбу собранные ящики. При необходимости отрегулируйте зазоры винтами крепёжного фасадного элемента metaboxов.
- 5.7 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается во внешнем осмотре, при котором должно быть проверено: отсутствие механических повреждений влияющих на работоспособность изделия, наличие и прочность крепления, отсутствие слабо закрепленных элементов.

## 6. Комплектующая ведомость на детали и фурнитуру



| №  | Наименование             | Кол. |
|----|--------------------------|------|
| 1  | Ст. бок. лев. (в сборе)  | 1    |
| 2  | Ст. бок. прав. (в сборе) | 1    |
| 3  | Ст. сред. (в сборе)      | 1    |
| 4  | Ст. сред. (в сборе)      | 1    |
| 5  | Ст. верт. зад.           | 2    |
| 6  | Ст. верт. зад.           | 1    |
| 7  | Крышка                   | 1    |
| 8  | Ст. горизонт. нижн.      | 1    |
| 9  | Дверь                    | 1    |
| 10 | Полка                    | 1    |
| 11 | Ст. ящ. зад.             | 8    |
| 12 | Дно ящ.                  | 8    |
| 13 | Фасад ящика              | 8    |

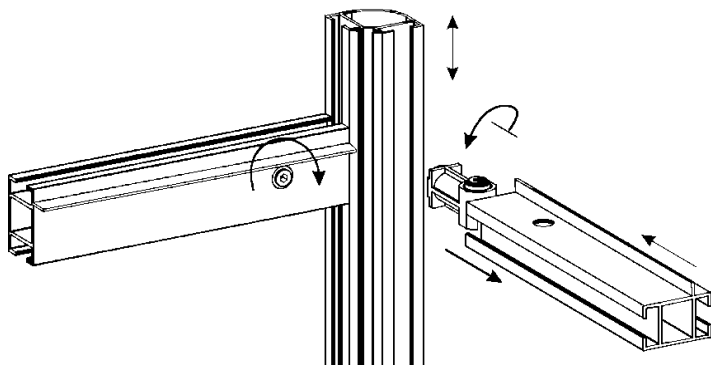

| №  | Наименование | Кол. |
|----|--------------|------|
| 14 | Ригель       | 12   |

| №  | Наименование   | Кол. |
|----|--|------|
| 15 | Заглушка резьбовая                                     | 4    |
| 16 | Заглушка резьбовая (для средней стойки)                | 4    |
| 17 | Опора регулировочная                                   | 8    |
| 18 | Полкодержатель   | 4    |
| 19 | Саморез с прессшайбой                                  | 36   |
| 20 | Уголок металлический                                   | 8    |
| 21 | Закладная установочная площадка (для поворотной петли) | 2    |
| 22 | Комплект поворотных петель (для двери из ЛДСП)         | 1    |

|    |                                      |     |
|----|--------------------------------------|-----|
| 23 | Магнитная защёлка                    | 1   |
| 24 | Подкладка для магнитной защёлки      | 1   |
| 25 | Направляющий механизм h86 (метабокс) | 8   |
| 26 | Шуруп 4x16                           | 149 |
| 27 | Шуруп 3.5x30                         | 2   |
| 28 | Ручка (с крепежными винтами)         | 9   |
| 29 | Ключ шестигранный                    | 1   |

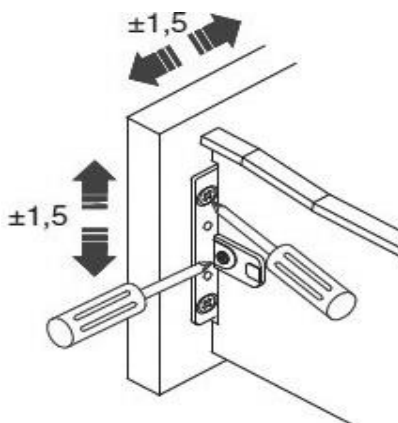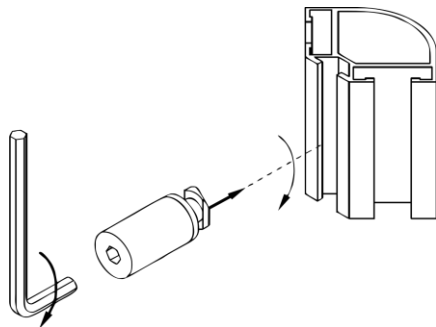

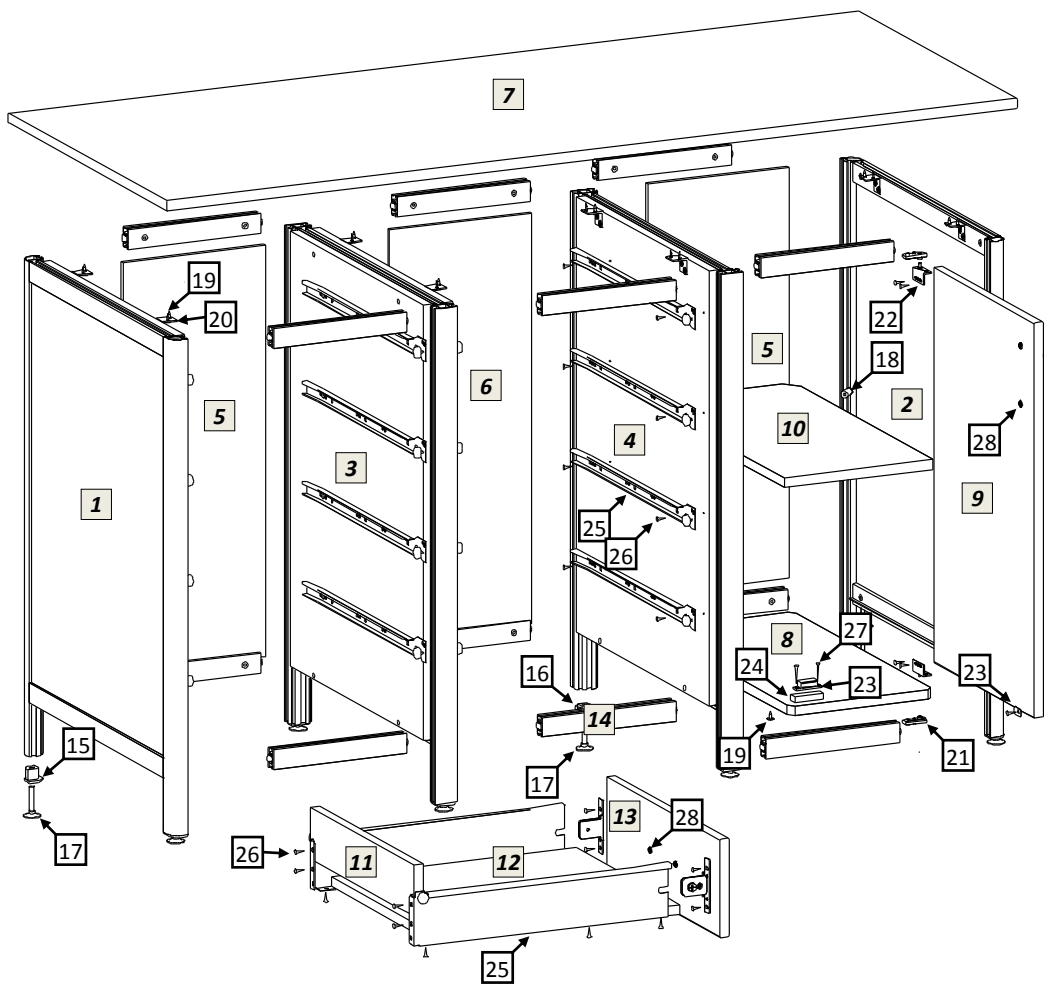


рис.1