

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")
исполнительное учреждение или филиал, или отделение исполнительного учреждения, производя декларацию о соответствии

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области от 14.05.2016 г. в д. основной государственной регистрационный номер 1025201635205

исполнительное учреждение или исполнительное предприятие (исполнительное учреждение, или предприятие, зарегистрированное в реестре)

Юридический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», Здание 1, Помещение № 001
Телефон: +7(83177) 4-80-62, адрес электронной почты: dzmo@dzmo.ru

лицо, подписавшее декларацию

в лице Генерального директора Кострова Андрея Владимировича
заявляет, что
Столик инструментальный СИ-5 по ТУ 9452-002-07614107-96

исполнительное учреждение или исполнительное предприятие (исполнительное учреждение, или предприятие, зарегистрированное в реестре)

Серийный выпуск

исполнительное учреждение или филиал (исполнительное учреждение, или филиал, зарегистрированное в реестре), выпускающее декларацию

изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")

Адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», Здание 1, Помещение № 001
Фактический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», Здание 1, Помещение № 001
Адрес производства: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок №3, здание №3/2; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание №5/1
Код ОК 034-2014: 32.50.50.000, Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9402 90 000 0

соответствует требованиям
ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4

исполнительное учреждение или филиал (исполнительное учреждение, или филиал, зарегистрированное в реестре), принимающее декларацию

Декларация принята на основании Сертификата системы менеджмента качества ГОСТ ISO 13485-2016 (ISO 13485:2016) № РСК.RU.0001.P394224 с 30.11.2018 по 29.11.2021 года, выданного ОС ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖС0.001).

Регистрационный номер удостоверения на медицинское изделие № ФСР 2009/05704 от 12.11.2015 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).

исполнительное учреждение, принимающее декларацию

Дата принятия декларации: **10.12.2018**
Декларация о соответствии действительна до **09.12.2023**

М.П.  **А.В. Костров**
исполнительное учреждение или филиал (исполнительное учреждение, или филиал, зарегистрированное в реестре), принимающее декларацию

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Основной государственный регистрационный номер: 1107746918510.
Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испытаний»

исполнительное учреждение или филиал (исполнительное учреждение, или филиал, зарегистрированное в реестре)

117420, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, офис 900
Телефон +7(499) 746-9184, факс +7(499) 678-20-84, адрес электронной почты info@mercis.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ82 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 04.09.2015 года, выдан Федеральной службой по аккредитации

Дата регистрации: **10.12.2018**, регистрационный номер декларации **РОСС RU Д-РУ.АГ82.В.00693/18**
лицо, подписавшее декларацию

М.П.  **Ш.Н. Рузина**
исполнительное учреждение или филиал (исполнительное учреждение, или филиал, зарегистрированное в реестре)

ОКП 94 5210

ПУ № ФСР 2009/05704 от 12.11.2015 г. ДС № РОСС RU Д-РУ.АГ82.В.00693/18

**СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИ-5
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
2Ц6209.00.000 ПС (разборный, на мебельных колёсах)**



Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед эксплуатацией.
Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Столик инструментальный СИ-5 (в дальнейшем - столик) предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов в перевязочных и операционных.
Столик изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444 в соответствии с требованиями ТУ 9452-002-07614107-96.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Длина	710 ± 100 мм
Ширина	475 ± 100 мм
Высота	960 ± 100 мм
Масса	9 кг
Предельная рабочая нагрузка, не более:	
- на столик	25 кг
- на одну полку	12,5 кг
Усилие передвижения столика, не более	8 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

3. Комплектность

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, штук	Поз. по рис.
1	Столик инструментальный СИ-5 (в сборе с поз. 2-8)	1	
2	Боковина	2	1
3	Панель	2	2
4	Колесо мебельное	4	3
5	Болт М8х20	8	4

Продолжение таблицы 2


6	Шайба А.8	8	5
7	Трубка	4	6
Эксплуатационная документация			
8	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1	

Примечание:

1. При поставке столиков крепежные изделия поставляются установленными в местах их креплений или уложенными в пакет.
2. В соответствии с условиями договора на поставку продукции столик может комплектоваться колёсами с \varnothing 50 или 100 мм, как с тормозом, так и без тормоза.
3. В соответствии с условиями договора на поставку продукции столик может быть изготовлен с 3-мя панелями в сборе.

4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

- 4.1. Столик состоит из двух боковин 1 и панелей 2 на трубах 6. Столик снабжен четырьмя самоориентирующимися мебельными колёсами 3.
- 4.1.1. Панели 2 выполнены из нержавеющей стали. По условиям договора на поставку могут быть изготовлены из стекла или другого материала.
- 4.2. Для подготовки к работе, необходимо распаковать столик и очистить от упаковочного материала (для облегчения снятия защитной плёнки рекомендуется обработать поверхность горячей водой, температурой не более 60°C), защитную пленку с лицевой поверхности панели 2, снять после того как столик будет полностью собран.
- Надеть панели 2 на трубки 6, вставив трубки 6 в соответствующие отверстия в панели 2 согласно рисунка. Затем при помощи болтов 4 с шайбами 5 закрепить трубки 6 в боковинах 1. Установить надежно колесо 3 на соответствующие места к боковинам. Все резьбовые соединения должны быть затянуты. После сборки изделия, снять защитную пленку с лицевой (зеркальной) поверхности панели 2. Выполнить санитарную обработку столика спиртом.
- 4.3. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** использование неисправного столика. Во избежание падений предметов с панелей и опрокидывания столика, избегайте резких рывков или ударов столика при его перемещении.
- 4.4. При наличии стеклянных панелей запрещается установка предметов на панели с резким соударением с поверхностью стекла.

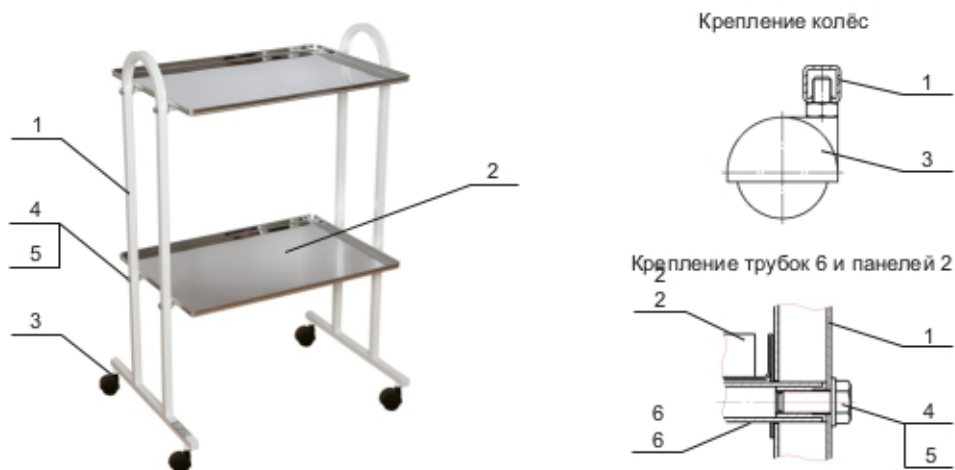

1 - боковина; 2 - панель; 3 - колесо мебельное; 4 - болт; 5 - шайба; 6 - трубка.

Рисунок 1





Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.



Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.



Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельств выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона (с голограммой).
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

5. Техническое обслуживание

- 5.1. Не реже одного раза в месяц производите осмотр столика и, при необходимости, подтяжку крепежа.
- 5.2. Чистку и дезинфекцию изделия производите салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором. Салфетка должна быть отжата, после чистки столик необходимо вытереть насухо. Перед чисткой и дезинфекцией изделия не используйте химические чистящие средства и растворители, а также аэрозоли. Не применяйте механические приспособления для чистки и дезинфекции.
- 5.3. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлоромина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

6. Сведения об утилизации

Поскольку столик не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

7. Транспортирование и хранение

- 7.1. Транспортирование столика должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.
- 7.2. Столик должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°C до плюс 40°C, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°C и при более низких температурах без конденсации влаги. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
- 8.2. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-002-07614 107-96.
- 8.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.
- 8.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

9. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

- 9.1. Истечение гарантийного срока.
- 9.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
- 9.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
- 9.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
- 9.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
- 9.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

10. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:

- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию;
- описания дефекта товара и характера неисправности;
- обстоятельств выявления дефекта;
- контактной информации ответственного лица.

2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.

3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

11. Свидетельство о приемке

Столик инструментальный

Наименование изделия

СИ-5

Обозначение

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Сборщик / упаковщик

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок и голограммы производителя

Наименование
товара

СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИ-5

Серийный номер

Дата производства

Гарантийный срок

12 месяцев

со дня продажи

Заполняет продающая организация

Наименование
продающей
организации

Дата продажи

ФИО / Подпись

м.п.

Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
К комплектации и внешнему виду
товара претензий не имею.

Наименование
покупателя

ФИО / Подпись

м.п.

