

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТОРАЗ 3-х секционный массажный стол с регулировкой наклона головной, средней и ножной секции



SPÓŁKA z o.o.
TECHNOMEX

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы благодарим Вас за приобретение массажного стола. Эти столы для обследования и процедур были специально разработаны для работы мануальных- и физиотерапевтов. Анатомически сконструированная поверхность в сочетании с множеством возможных позиций секций дает Вам возможность наиболее удобно расположить Вашего пациента.

Во время разработки и производства столов особое внимание было уделено надежности, безопасности, легкости управления и долговечности. Перед началом работы изучите данную инструкцию.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

1. Никогда не регулируйте секцию, когда она поддерживает весь вес пациента. Все секции кушетки Mapumed снабжены газовыми пружинами. Помимо того, что они облегчают управление, эти пружины обеспечивают полную поддержку секций. Однако газовые пружины настолько крепкие, чтобы поднимать секцию, на которую приходится весь вес пациента.
2. Используйте обе руки для изменения положения секций: одну для размыкания, другую для регулировки секций.
3. Во время регулировки высоты кушетки максимально допустимый вес пациента – 150 кг.
4. Если кушетка снабжена электрическим мотором, никогда не допускайте его непрерывной работы больше 4 минут. В случае превышения указанного времени электричество будет выключено автоматически с целью защиты мотора от перегрева. Если такое произойдет, выдерните сетевой кабель и дайте мотору остыть, пока он не сможет снова работать.
5. Кушетка не является антистатической.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Регулировка высоты (основная)

Убедитесь, чтобы во время регулировки высоты кушетки между движущимися частями механизма не попадали части одежды/тела пациента или врача.

Будьте особенно внимательны при ситуациях, обозначенных ниже (кушетка находится в согнутом положении, при этом высота кушетки – самая низкая):

- А. Под подголовником, между подголовником и полом.
- В. Под секцией для ног, между секцией для ног и каркасом.
- С. Под планками регулировки кушетки (ноги терапевта). Подобные ситуации могут иметь место, только когда кушетка находится на самой низкой высоте.

2. Регулировка высоты (подголовник с подлокотниками)

Если кушетка снабжена подголовником с подлокотниками, невозможно полностью опустить секцию для спины (положение сгиба). Когда кушетку необходимо установить в данное положение, подлокотники следует убрать.

3. Регулировка подголовника

Подголовник можно полностью сложить. В этом случае невозможно достигнуть положения сгиба.

Подголовник с подлокотниками

Подлокотники необходимо отсоединить, если собираетесь полностью сложить подголовник.

4. Опасность опрокидывания

Нельзя сидеть на подголовнике и подлокотниках из-за опасности опрокидывания кушетки.

5. Нагрузка

Подголовник: не приспособлен для сидения и должен использоваться только для поддержки головы.

6. Фиксирование покати́стых секций поверхности

Следите, чтобы покати́стые секции поверхности специальной кушетки для вытяжения были зафиксированы во время, когда кушетка не используется для процедуры вытяжения (например, когда пациент ложится на кушетку или слезает с нее).

7. Вытяжение только в горизонтальном положении

Убедитесь, что все секции поверхности кушетки для вытяжения находятся в горизонтальном положении.

УХОД

Для дезинфекции можно использовать тряпку, смоченную 70% спиртовым раствором.

Регулярно проверяйте механизм регулировки секций.

Для надлежащей работы поддерживайте планки механизма в чистоте и не допускайте жирового налета на них (смазки).

По крайней мере каждые 6 месяцев проверяйте функционирование регулировки по высоте если она не была задействована длительное время. Если кушетка не используется в течение длительного срока, отсоедините сетевой кабель из розетки.

Экологическая информация

Материал, из которого изготовлены столы, может подлежать повторной обработке, и/или является опасным для окружающей среды. Когда истекает срок службы кушетки, специалисты могут забрать кушетку и провести сортировку опасных материалов и материалов, подлежащих повторной обработке. Вызвав специалистов, вы внесете свой вклад в улучшение окружающей среды.

Пожалуйста, убедитесь, что Вы хорошо проинформированы относительно правил уничтожения оборудования и принадлежностей.

Грузоподъемность	: 150 кг
Напряжение	: 230Vac/50/60 Uw
Энергопотребление	: 1.0 A макс.
Режим работы максимум	: Кратковременный, 4 мин.
Влагозащищенность	: согласно IP 54
Медицинская классификация (93/42ЕЕС))	: I (согласно Директивы о Медицинских приборах
Класс безопасности	: II* тип В** согласно IEC 60601-1


Климатические условия для транспортировки и хранения

Температура воздуха	: от -10° до + 50° C
Относительная влажность	: от 10 до 95 %
Атмосферное давление	: от 500 до 1060 к Па

Климатические условия при использовании

Температура воздуха	: от -10° до + 50° C
Относительная влажность	: от 10 до 95 %
Атмосферное давление	: от 500 до 1060 к Па

Размеры секций:

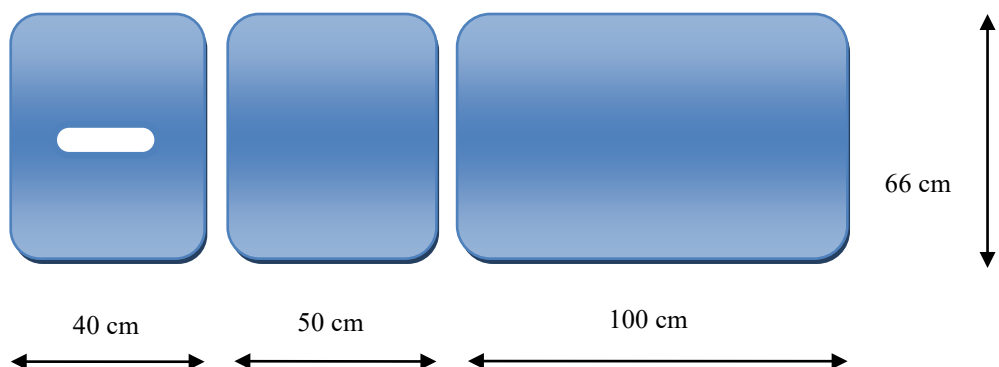

Размеры стола:

- **Длина x Ширина x Высота – 190 x 66 x 49 ÷ 105 cm**

Вес стола


- **70 kg**

Регулировки:

- **Высота стола 49 - 105 cm**

- **Регулировка секций**

- Подголовник -85°/+35°
- Ножная секция 0°/+70°
- Средняя секция 45°

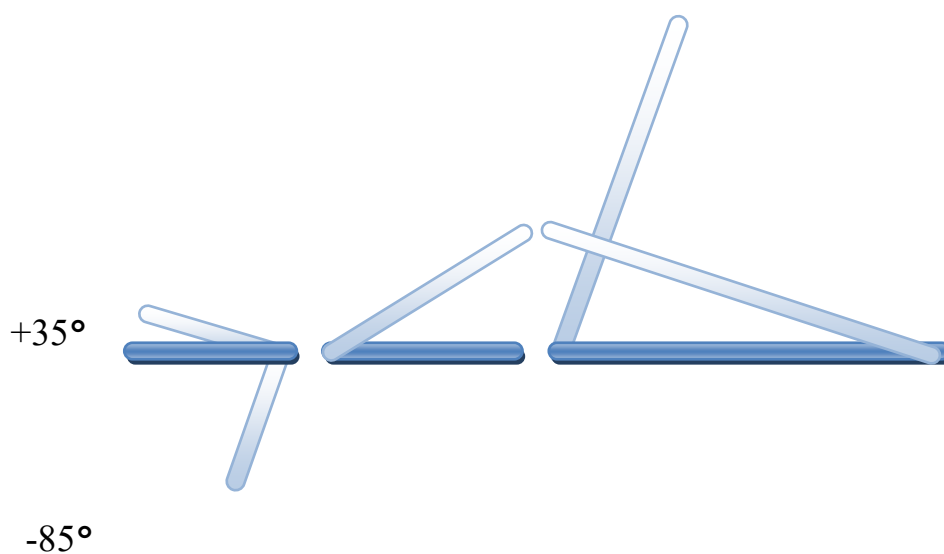

Классификация I медицинских приборов

Данное оборудование соответствует всем требованиям Директивы о Медицинских приборах (93/42/ЕЕС)

Международный класс безопасности IEC 60601-1

*I: Класс безопасности II (двойная изоляция)

**В: Утечка тока и заземление соответствуют стандарту IEC 60601-1.

Модификации сохранены.



Дополнительные опции



Головная секция
с упорами для рук



Раздатчик
бумажного рулона



Ролики
для перемещения стола

AVAILABLE TABLE COLORS:

