

МЕБЕЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ: ШКАФ МД ТРЕЙЗЕР РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Изделия являются встраиваемыми запираемыми секциями (далее трейзеры) и предназначены для хранения медикаментов, перевязочного материала и других вещей в больницах и других лечебных заведениях.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 В комплект входит: ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 2 ключа; инструкция по установке; руководство по эксплуатации.

2.2 Модели комплектуются **ключевым** замком Euro-locks.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты, мм (в-ш-г)	Внутренние габариты (в-ш-г)	Кол-во дверок, шт.	Масса, кг (без скоб и стопора)	Масса, кг (со скобами и стопором)
Шкаф MD трейзер 1650	240 – 427 – 252	238- 425 - 222	1	4,04	4,45
Шкаф MD трейзер 1670	240 – 627 – 252	238- 625 - 222	2	5,7	6,1

Отклонение веса указанного в таблице - $\pm 10\%$

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Трейзеры можно эксплуатировать в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Шкаф устанавливается на полку медицинского шкафа MD.

Трейзер MD 1650 – может быть установлен в шкафы всей линейки MD (в шкафы SG, только в нижнее отделение)

Трейзер MD 1670 может быть установлен в шкафы MD 2 1670/SS(SG*), и MD 2 1780/SS(SG*)

* -(в шкафы SG, только в нижнее отделение)

Допускается протирать дезинфицирующими растворами и моющими средствами

5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в любом виде в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления шкафа.

Изготовитель не несет ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата
изготовления: _____

Отметка
службы качества _____