

7. Свидетельство о приемке.

Банкетка медицинская БМ.01.00

Соответствует ТУ 9452-003-68690950-2014

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия: _____

Упаковщик: _____

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.

Фактический адрес: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18

E-mail: zakaz@tdask.ru

ОБРАЗЕЦ

ООО Медицинская Компания



Паспорт

| Арт. | Наименование |
|----------|-----------------------------------|
| БМ.01.00 | Банкетка медицинская (вид 156900) |



ТУ 9452-003-68690950-2014

г. Нижний Новгород

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Банкетка предназначена для сидения не более 3 человек.
- 1.2. Банкетка изготовлена из панели ДСП, обита поролоном и обтянута винилискожей, установлена на каркас из стальных труб, окрашенных методом порошковой полимерной окраски.

2. Основные технические характеристики.

| Габаритные размеры, мм | | | Масса, кг не более |
|------------------------|---------|--------|-----------------------|
| Ширина | Глубина | Высота | |
| 1540 | 370 | 450 | 15 |

3. Комплект поставки.

| № п/п | Наименование (размеры, мм) | Кол-во, шт. |
|-------|----------------------------|-------------|
| 3.1 | Ложе в сборе | 1 |
| 3.2 | Ножка | 2 |
| 3.3 | Винт мебельный М6х70 | 8 |
| 3.4 | Шайба Т6 | 8 |
| 3.5 | Гайка М6 | 8 |
| 3.6 | Паспорт | 1 |
| 3.7 | Упаковка | 1 |

Внимание! Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется два ключа на 10 мм.

- 4.1. Распаковать компоненты банкетки.
- 4.2. Перевернуть ложе банкетки в сборе обратной стороной и положить на чистую сухую поверхность.

4.3. Привернуть ножки 3.2 через отверстия в каркасе ложе 3.1 при помощи винтов 3.3, шайб 3.4 и гаек 3.5.

4.4. Установить банкетку на ножки.

5. Условия хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.3. Условия транспортирования оборудования крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.4. Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.5. Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.6. Хранение оборудования в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

5.7. Оборудование предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;

- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

ОБРАЗЕЦ