

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

1.1. Опоры для ног по Геппелю (далее — опора) предназначены для использования при проведении гинекологических и урологических операций и процедур на столах операционных универсальных СОУ - «МСК», изготовленных по ТУ 9452-027-52962725-2008.

1.2. Опора изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

2.1. Основные параметры и размеры.

2.1.1. Основные параметры и размеры опоры указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров
	МСК-629/8
1. Габаритные размеры одной опоры, мм, ±5 мм	530x280x170
2. Габаритные размеры подушки, мм	280x170x80
3. Диапазон регулирования по высоте, мм	300
4. Угол вращения подушки вокруг вертикальной оси, град	360
5. Масса комплекта (две шт.), кг, не более:	8

2.2. Характеристики:

2.2.1. Опора выдерживает номинальную нагрузку массой 37,5 ±0,5 кг.

2.2.2. Поверхность опоры устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

3.1. Комплект поставки соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование изделия	Кол-во, шт.
1	Опора в сборе	2
2	Универсальный зажим	2
5	Паспорт	1

**4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

4.1. Опора состоит из стойки, подушки, шарнирного соединения, резьбового фиксатора и универсального зажима.

4.2. Подушка имеет металлический каркас, поролоновую прослойку и облицована винилскожей.

4.3. Стойка, шарнирное соединение, фиксатор и универсальный зажим изготовлены из нержавеющей стали.

4.4. Подушка имеет шарнирное соединение со стойкой, что позволяет устанавливать ее в удобном положении при помощи резьбового фиксатора.

4.5. Опора имеет универсальный зажим для крепления к направляющей средней секции операционного стола и позволяющий регулировать положение опоры по высоте и вдоль панели стола.

**5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

5.1. К сборке и эксплуатации опоры допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию изделия и правила его эксплуатации.

**6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

6.1. После транспортирования изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2. Распаковать изделие и проверить целостность деталей и облицовки.

6.3. Проверить комплектность.

6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

**7. ПОРЯДОК СБОРКИ**

7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

7.2. Осуществить сборку согласно инструкции:

- установить универсальный зажим на направляющую средней секции операционного стола и зафиксировать;

- вставить стойку в зажим и зафиксировать на необходимой высоте;

- установить подушку в удобное положение и зафиксировать.

**8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

8.1. Опора не требует специального технического обслуживания.

**9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

9.1. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С без конденсации влаги.

9.2. Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

**10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие подколленной опоры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

10.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.

10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

**11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Опоры для ног по Геппелю(пара) МСК-629/8 \_\_\_\_\_  
Дата выпуска \_\_\_\_\_

М. П.

Соответствуют ТУ 9452-027-52962725-2009 и признаны годными к эксплуатации.

Подписи лиц, ответственных за приемку \_\_\_\_\_

**12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники \_\_\_\_\_

наименование и тип изделия

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска \_\_\_\_\_

Приобретено \_\_\_\_\_

Дата, подпись и штамп торгующей организации

Производитель: ООО «Медстальконструкция»

Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00

