

ТЕРМОБАХИЛЫ

ООО «ЭкоМедикалПлюс»

Воронеж, улица Латненская, 3а

Телефон отдела продаж: +7 (473) 228-67-06

+7(473) 200-67-06

Сервисный центр: +7 960 112-88-35

www.termobahily.ru

info@termobahily.ru

ТЕРМОБАХИЛЫ

Машина для

надевания термобахил "СтЭко"

■ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЭКО medical +



ЭКО medical +

7. Меры предосторожности

Во время использования соблюдайте следующие правила:

! Не становитесь на прибор босиком во избежание ожогов!

! Не помещайте в прибор руки!


! Не помещайте в прибор электрические провода, железную проволоку и другие посторонние предметы!

! Не помещайте под прибор какие-либо предметы, так как они могут затруднить приток воздуха!

! Ничем не накрывайте и не закрывайте прорезь для беспрепятственной подачи пленки!


8. Неполадки и их устранение

Неполадка	Причина	Способ устранения
Замятие плёнки	Внутреннее или внешнее замятие	Выключите/включите машину, переустановите заново ролик
Плёнка не обрезается	Серьёзное замятие плёнки Функция обрезания плёнки не работает	Переустановите заново ролик пленки Свяжитесь с ремонтным центром
Плёнка съезжает набок	Плёнка неправильно установлена	Заново установите пленку согласно инструкции и схеме установки
Плёнка неправильно подаётся и складывается вдвое	Выходное отверстие засорено или не исправно режущее устройство	Свяжитесь с ремонтным центром
Неисправность сваривания плёнки	Заблокирован приток воздуха под машиной	Проверьте и устраните препятствие для воздуха
Постоянно отключается защитный автомат	Перегрев машины	Свяжитесь с ремонтным центром
Плёнка съедается по периметру детали		Свяжитесь с ремонтным центром

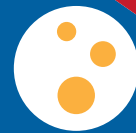

Рабочее время

В машине «СтЭко» можно установить промежуток рабочего времени. Машина сама включится в начале и сама выключится в конце рабочего дня.



<p>Нажимайте, для увеличения значения</p> <p>Нажимайте, для уменьшения значения</p>		<p>Нажимайте для перемещения курсора</p> <p>Нажмите для сохранения и выхода</p>
---	--	---

Отключение таймера

	<p>Нажмите, для сброса таймера рабочего времени</p>
--	---

Содержание

1. Введение.....2
2. Комплектация.....2
3. Технические характеристики.....3
4. Сфера применения и безопасность.....4
5. Подключение и использование.....6
6. Инструкция панели управления.....7
7. Меры предосторожности.....13
8. Неполадки и их устранение.....13

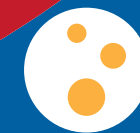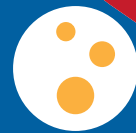

1. Введение

Приобретя машину «СтЭко», вы сделали правильный выбор: благодаря данному устройству больше не придётся думать о грязи, оставляемой на полу обувью после улицы.

Руководство по эксплуатации содержит необходимые инструкции и правила использования устройства.

2. Комплектация


Машина для надевания бахил «СтЭко»	1
Сетевой кабель	1
Руководство по эксплуатации	1

Уровень нагрева

Это параметр регулировки температуры усадки плёнки.


По умолчанию: -2.

В соответствии с личными предпочтениями, уровень температуры может быть скорректирован

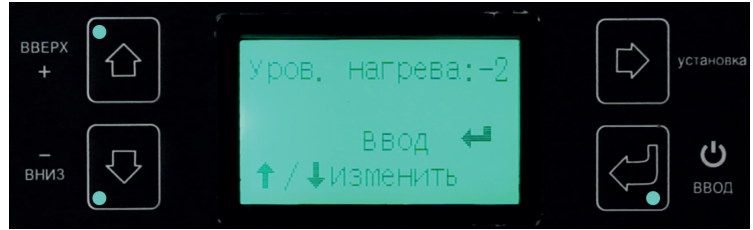Нажимайте, для увеличения температуры		Нажмите для сохранения и выхода
---------------------------------------	---	---------------------------------


Установка времени

Нажимайте, для увеличения значения		Нажимайте для перемещения курсора
Нажимайте, для уменьшения значения		Нажмите для сохранения и выхода

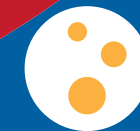

Настройки

Переключите режим работы на «Настройки», нажимая на кнопку, затем нажмите **«ВВОД»**, чтобы войти в меню, а затем снова нажимайте **«УСТАНОВКА»** для выбора одной из пяти функций: «Установка остатка», «Уровень нагрева», «Текущее время», «Время работы», «Отключение таймера».

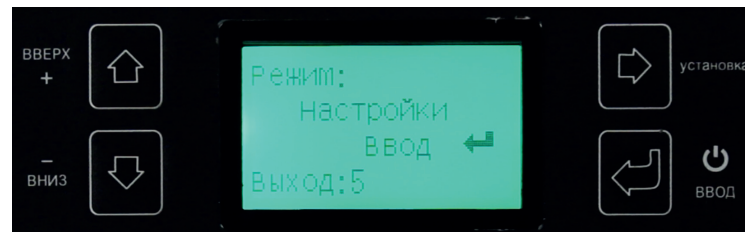

Установка остатка

С установкой нового ролика плёнки удобно скорректировать счётчик.

Нажимайте, чтобы
увеличить на 100



Нажимайте, чтобы
уменьшить на 100



Нажмите для
сохранения и
выхода

3. Технические характеристики

Тип	электронный
Размеры	802x450x325 мм
Уровень относительно пола	20 мм
Вес	20,5 кг
Время запайки	4 сек
Время формирования	2 сек
Максимальная мощность	1300 Вт
Время прогрева	3 мин
Параметры сети	220±5 % В 50 Гц
Потребляемая мощность	75 Вт
Ролик пленки	на 550, 700, 900 пар обуви

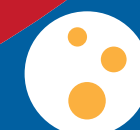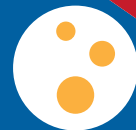

4. Сфера применения и безопасность

Сфера применения

Устройство предназначено для использования в чистых помещениях, воздух в которых не содержит воспламеняющихся частиц пыли, при температуре от 5 °С до 40 °С. Помещение должно располагаться не выше 2000 м над уровнем моря.

Поливинилхлоридная пленка в определенной степени статически наэлектризована. В чувствительных к статическому электричеству помещениях следует замерить и принять во внимание уровень статической электризации!

Безопасность

Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации, ознакомьтесь с операциями управления и следуйте указаниям.



Перед подключением устройства к источнику тока убедитесь в том, что местное напряжение сети составляет 220-240 В.

Будьте внимательны, на влажном полу можно поскользнуться!

Режим «Сушка»

Функция предназначена для особых погодных условий.

Перед использованием этой функции, пожалуйста, убедитесь, что плёнка не загружена в прорезь для её подачи. Использование режима «Сушка» допускается только без плёнки. В зависимости от температуры окружающей среды, температура нагревателей машины может быть скорректирована.

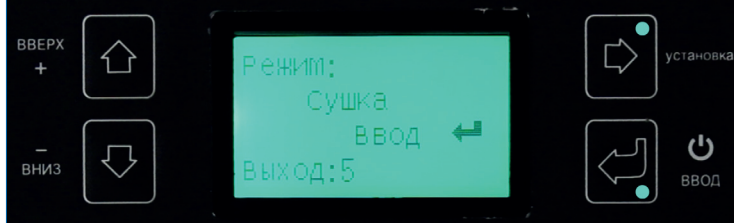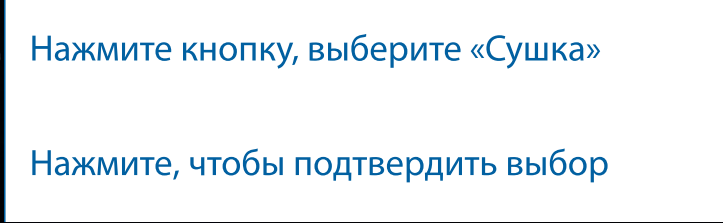
	<p>Нажмите кнопку, выберите «Сушка»</p> <p>Нажмите, чтобы подтвердить выбор</p>
<p>Нажимайте, чтобы увеличить температуру</p> <p>Нажимайте, чтобы уменьшить температуру</p>	

Для сушки нажмите на педаль.

Для выхода из режима «Сушка» нажмите «УСТАНОВКА», машина выключится.




Включение/выключение

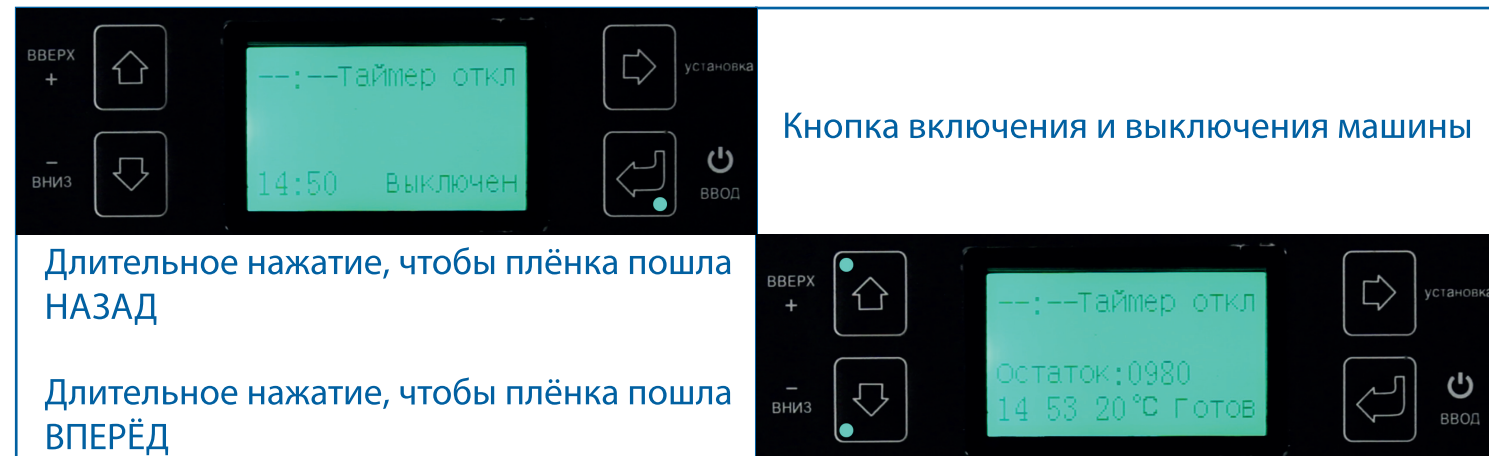

Внимание


В случае ненадежного заземления системы электропитания существует опасность для жизни и возможно повреждение машины.

- ! Не ставьте машину под открытым небом, следите за тем, чтобы на неё не попадали брызги воды.
- ! Не становитесь на устройство босиком. Использование устройства допускается только в обуви.
- ! Не допускайте попадания посторонних предметов в устройство.
- ! Не поскользнитесь. По возможности не ходите в обуви по влажному полу, влажным лестницам и коврам.
- ! Перед обслуживанием устройства отключите его от электросети.
- ! Не позволяйте детям пользоваться устройством самостоятельно!

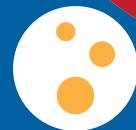

5. Подключение и использование


1. Вставьте сетевой кабель в машину, а затем в розетку.
2. Нажмите «**ВВОД**» чтобы включить машину.
3. Откройте верхнюю крышку машины, обрежьте ровно плёнку для последующей равномерной установки.
4. Вставьте горизонтально ролик.

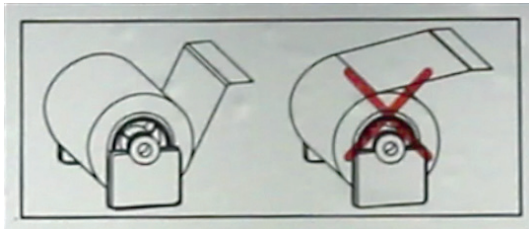

5. Вставьте плёнку в прорезь для её подачи.
6. Одновременно, нажимайте «**ВНИЗ**» пока плёнка не выйдет с другой стороны.
7. Убедитесь, что машина прогрелась после включения (исчезла надпись «Подождите»)
8. Нажмите на педаль, машина должна заработать, после этого плёнка автоматически выезжает на всю длину педали. Если машина не работает нажмите «**ВВЕРХ**» пока плёнка не выйдет назад и повторите всю операцию заново. Когда плёнка находится в рабочем положении (вся длина педали) машина готова к работе.
9. Наступите на педаль и нажмите.
10. Держите ногу до тех пор, пока на дисплее заполняется шкала. Характерный звуковой сигнал оповещает о готовности бахилы.
11. Поднимите ногу, плёнка автоматически выезжает для следующего использования.

6. Инструкция панели управления


Панель управления состоит из ЖК-экрана и четырёх функциональных кнопок. Через функциональные кнопки осуществляется управление режимами работы и настройками: «Рабочий режим», «Режим сушки» и «Настройки». Переключение между режимами осуществляется кнопкой «**УСТАНОВКА**».

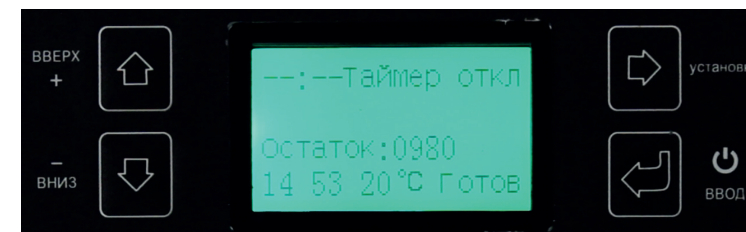

Рабочий режим



Режим сушки

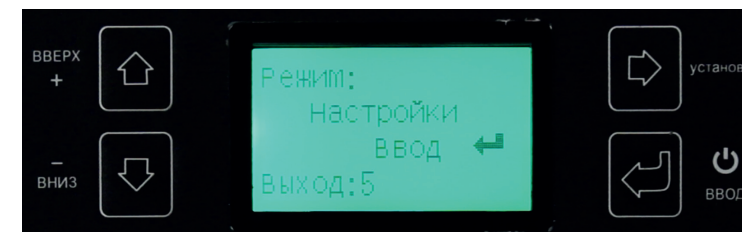

Настройки

