

## 6. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

- 6.1 Транспортировка мебели должна производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
- 6.2 Размещение и крепление упаковок с мебелью в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.
- 6.3 Мебель предназначена для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.
- 6.4 Сохранность и продолжительность эксплуатации мебели зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и в значительной степени, от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Нормальные условия для хранения и эксплуатации мебели – температура воздуха от +10<sup>0</sup>С до +40<sup>0</sup>С при относительной влажности 45-70%.  
**Рекомендуется:** удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку дезинфицирующими средствами способом протирания (допускается использование раствора «Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в кол-ве 50г на 10л раствора); периодичность обработки – до 2-х раз в сутки.  
**Не допускается:** механическое повреждение деталей мебели и попадание на их поверхность влаги и растворителей; хранение в сырых неотапливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие прямых солнечных лучей.

## 7. Гарантийные обязательства, свидетельство о приемке

- 7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели – 12 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- 7.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: истечение срока гарантии; нарушение правил хранения и эксплуатации; наличие механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.  
Замена фурнитуры и деталей мебели, имеющих дефекты **производственного характера**, осуществляется при предъявлении настоящего гарантийного талона и упаковочных этикеток. За изделия с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.**

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата выпуска изделия: \_\_\_\_\_

Упаковщик: \_\_\_\_\_

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.

Место производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18


E-mail: [zakaz@tdask.ru](mailto:zakaz@tdask.ru) [www.tdask.ru](http://www.tdask.ru)

ООО Медицинская Компания



## Паспорт

Арт.	Наименование
СП.02.00	Стол пеленальный (смотровой) (вид 303440)

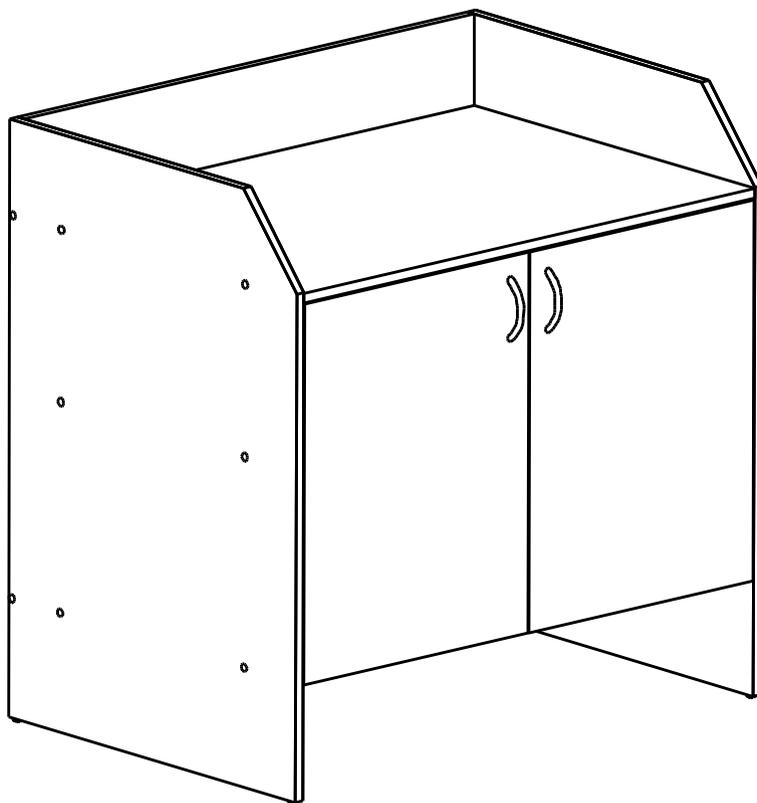

ТУ 9452-003-68690950-2014

г. Нижний Новгород

## 1. Назначение

1.1 Стол предназначен для оснащения медицинских учреждений, используется для пеленания детей, проведения медицинского осмотра и врачебных манипуляций.

## 2. Основные технические характеристики

2.1 Корпус и крышка стола выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм. Применяемая мебельная фурнитура позволяет многократную сборку и разборку изделия.

Арт.	Описание	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
		ширина	глубина	высота	
СП.02.00	Стол пеленальный с 2-мя распашными дверями.	1010	700	1000	64

## 3. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Стол в разобранном виде с комплектом фурнитуры	1
Матрас для пеленального стола	1
Паспорт	1
Упаковка	1

## 4. Сборка стола

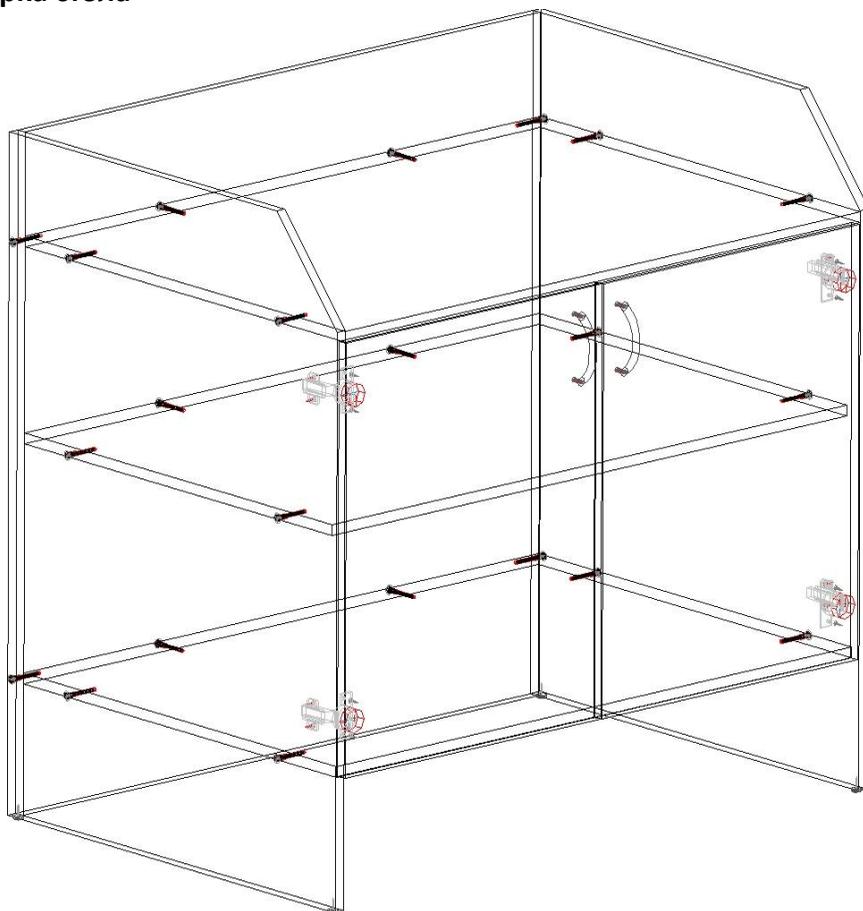


Рис. 1

- 4.1 Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис. 1, сверяясь с комплектовочной ведомостью на изделие. Согласно позициям на схеме и комплектовочной ведомости определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку.
- 4.2 На вертикал. бок. стенках [1,2] установите подпятники (4). Евровинтами (1), как показано на рис. 1, соедините вертикал. стенки [1,2,3] с горизонт. ст. [4,5,6]. Закройте головки евровинтов (1) заглушками (2).
- 4.3 На дверях [7,8] установите ручки (6); при помощи шурупов (7) закрепите петли (5). Закрепите двери к боковым стенкам стола. При помощи регулировочных винтов петель выровняйте положение дверей и величину зазоров.

## 5. Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру

№	Наименование	А мм.	В мм.	Кол.
1	Ст. бок. лев.	1000	700	1
2	Ст. бок. прав.	1000	700	1
3	Ст. вертикал.	1000	980	1
4	Ст. горизонт.	980	656	1
5	Ст. горизонт.	980	668	1
6	Ст. горизонт.	980	684	1
7	Дверь лев.	634	487	1
8	Дверь прав.	634	487	1

№	Наименование	Кол.
1	Евровинт 7 x 50	22
2	Заглушка для евровинта	22
3	Ключ для евровинта	1
4	Подпятник с гвоздем	4
5	Петля 4-х шарнирная для вкладной двери (с ответной планкой под саморез)	4
6	Ручка	2
7	Шуруп 4x16	16