

6. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

- 6.1 Транспортировка мебели должна производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
- 6.2 Размещение и крепление упаковок с мебелью в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.
- 6.3 Мебель предназначена для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.
- 6.4 Сохранность и продолжительность эксплуатации мебели зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и в значительной степени, от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Нормальные условия для хранения и эксплуатации мебели – температура воздуха от +10⁰С до +40⁰С при относительной влажности 45-70%.

Рекомендуется: удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку дезинфицирующими средствами способом протирания (допускается использование раствора «Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в кол-ве 50г на 10л раствора); периодичность обработки – до 2-х раз в сутки.

Не допускается: механическое повреждение деталей мебели и попадание на их поверхность влаги и растворителей; хранение в сырых неотапливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие прямых солнечных лучей.

7. Гарантийные обязательства, свидетельство о приемке

- 7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели – 12 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- 7.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: истечение срока гарантии; нарушение правил хранения и эксплуатации; наличие механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

Замена фурнитуры и деталей мебели, имеющих дефекты **производственного характера**, осуществляется при предъявлении настоящего гарантийного талона и упаковочных этикеток. За изделия с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

Серийный номер: _____

Дата выпуска изделия: _____

Упаковщик: _____

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.

Место производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18


E-mail: zakaz@tdask.ru www.tdask.ru

ООО Медицинская Компания



Паспорт

| Арт. | Наименование |
|----------|------------------------------------|
| ТМ.01.01 | Тумба прикроватная (вид 156900) |

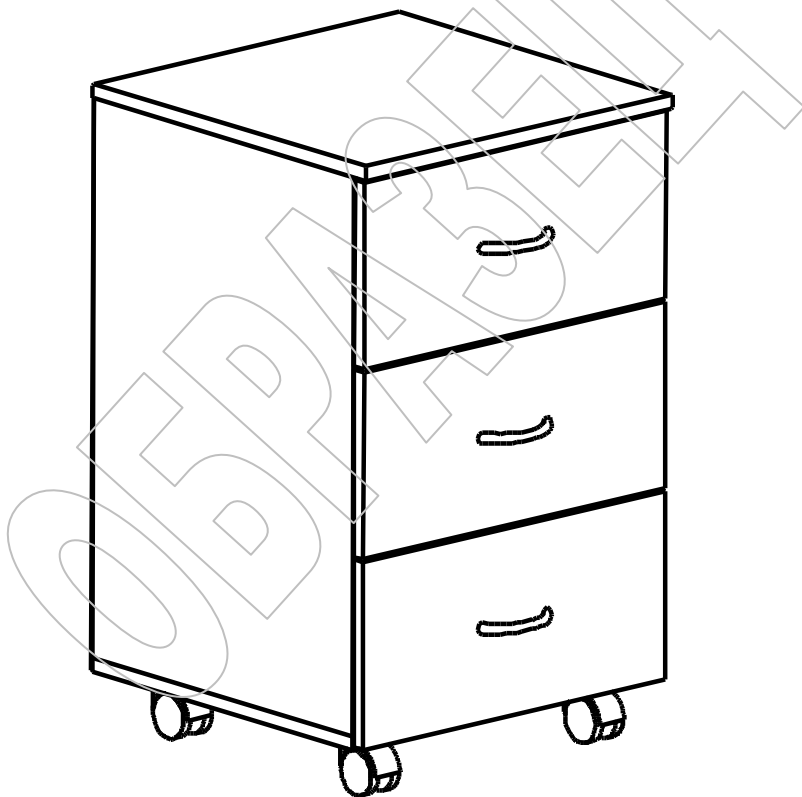

ТУ 9452-003-68690950-2014

г. Нижний Новгород

1. Назначение

1.1 Тумба предназначена для оснащения кабинетов и больничных палат медицинских учреждений. Используется для организации рабочего места, хранения личных вещей, документов, инструментов и расходных материалов, размещения медицинского инвентаря и аппаратуры.

2. Основные технические характеристики

2.1 Корпус и крышка тумбы, фасады, выдвижные ящики выполнены из ЛДСП толщиной 16мм, задняя стенка и днища ящиков – из ДВПО толщиной 3.2 мм. Применяемая мебельная фурнитура позволяет многократную сборку и разборку изделия.

| Арт. | Описание | Габаритные размеры, мм | | | Масса, кг не более |
|----------|---------------------------------|------------------------|---------|--------|-----------------------|
| | | ширина | глубина | высота | |
| ТМ.01.01 | Тумба подкатная с 3-мя ящиками. | 454 | 456 | 723 | 24 |

3. Комплект поставки

| Наименование | Кол-во, шт. |
|---|-------------|
| Тумба в разобранном виде с комплектом фурнитуры | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Упаковка | 1 |

4. Сборка тумбы

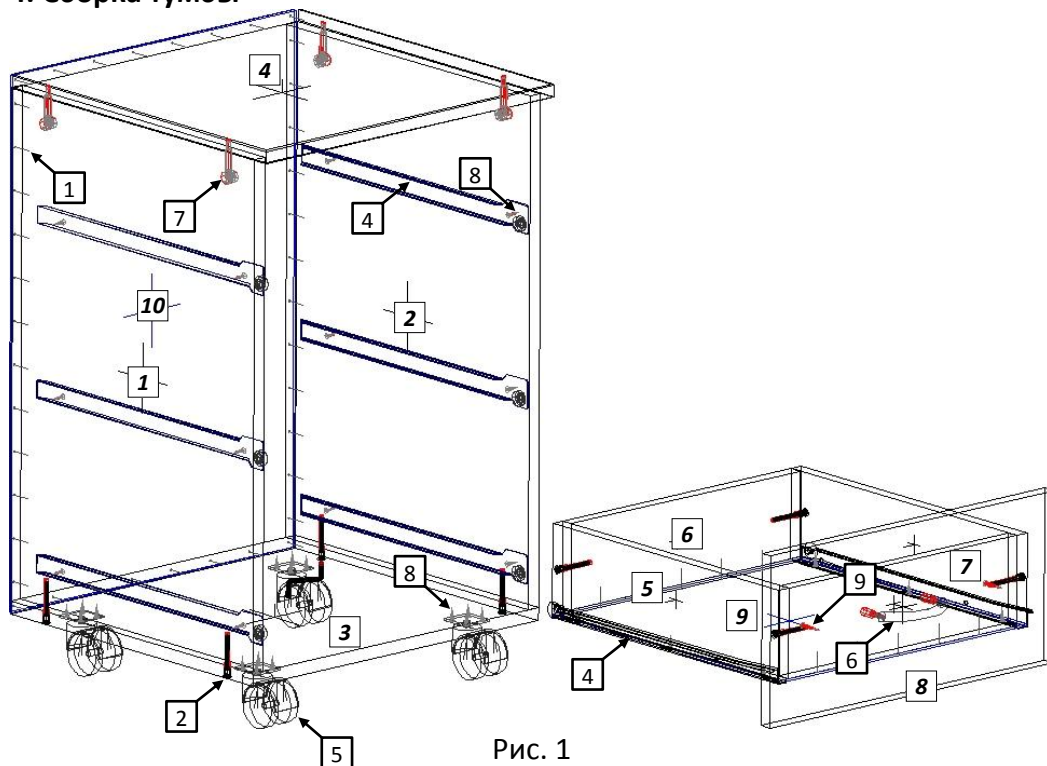


Рис. 1

4.1 Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис. 1, сверяясь с комплекточной ведомостью на изделие. Согласно позициям на схеме и комплекточной ведомости определите расположение деталей в изделии и порядок

их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку.

- 4.2 На горизонт. нижней стенке [3] шурупами 4×16 (8) закрепите колесные опоры (5). На вертикал. бок. стенках [1, 2] установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (7) в предназначенные для них отверстия; шурупами (8) закрепите [- образные части роликовых направляющих (4). На крышке [4] установите штоки эксцентр. стяжек (7).
- 4.3 Евровинтами (2), как показано на рис. 1, соедините вертикал. ст. [1, 2] с горизонт. ниж. ст. [3]. Установите крышку. Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. Гвоздями (1) закрепите зад. стенку ДВПО [10].
- 4.4 Сборка ящиков. Евровинтами (2) соедините боковые стенки ящика [5] с передней [7] и задней [6] стенками. Дно ящика [9] закрепите к перед. и зад. ст. гвоздями (1). Установите роликами назад J- образные части направляющих (4) и закрепите их шурупами 4×16 (8). Шурупами 3.5×30 (9) закрепите фасад [8] к перед. стенке ящика [7]. Установите на фасад ящика [8] ручку (6). Установите собранные ящики в корпус тумбы.

5. Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру

| № | Наименование | А мм. | В мм. | Кол. |
|----|----------------|-------|-------|------|
| 1 | Ст. бок. лев. | 626 | 430 | 1 |
| 2 | Ст. бок. прав. | 626 | 430 | 1 |
| 3 | Ст. гор. ниж. | 450 | 430 | 1 |
| 4 | Крышка | 452 | 454 | 1 |
| 5 | Бок. ящ. | 400 | 110 | 6 |
| 6 | Зад. ящ. | 360 | 110 | 3 |
| 7 | Перед. ящ. | 360 | 110 | 3 |
| 8 | Фасад ящика | 210 | 446 | 3 |
| 9 | Дно ящ. ДВПО | 400 | 390 | 3 |
| 10 | Ст. зад. ДВПО | 655 | 447 | 1 |

| № | Наименование | Кол. |
|---|----------------------------|------|
| 1 | Гвоздь | 70 |
| 2 | Евровинт 7 x 50 | 16 |
| 3 | Ключ для евровинта | 1 |
| 4 | Компл. роликовых напр. 400 | 3 |
| 5 | Опора колесная | 4 |
| 6 | Ручка | 3 |
| 7 | Стяжка эксцентр. | 4 |
| 8 | Шуруп 4 x 16 | 46 |
| 9 | Шуруп 3.5 x 30 | 6 |