

**Открытое Акционерное Общество
«Медикоинструментальный завод им. В.И. Ленина»**

**НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ НИП-«МИЗ-В»**

ПАСПОРТ

И _142 00 00 пс

1. Назначение

Набор поликлинический предназначен для поставки в районы с умеренным и холодным климатом. Исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Набор предназначен для перевязочных блоков сельских, районных и городских поликлиник.

2. Технические данные

Габаритные размеры набора в упаковке (440x220x250) мм

Масса набора не более 14 кг.

3. Комплект поставки

В комплект поставки набора входят изделия, указанные в таблице.

Наименование	Набор Н-142
Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1	2
Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1	4
Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №1	2
Зажим с кремальерой для операционного белья	4
Зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско №1	1
Зонд хирургический желобоватый, 170 мм	2
Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний	1
Иглодержатель сосудистый 200 мм	2
Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности с трехгранным острием ЗВ1-0,6х20	10
Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности с трехгранным острием ЗВ1-0,7х28	10
Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности с трехгранным острием ЗВ1-1,1х50	10

Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности с трехгранным острием ЗВ1-1,2х55	10
Катетер уретральный металлический изогнутый мужской №17	1
Корнцанг прямой	2
Корнцанг изогнутый	1
Крючок хирургический трехзубый острый №2	2
Крючки пластинчатые по Фарабефу (комплект из 3 штук)	1
Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые 140 мм	1
Ножницы хирургические тупоконечные прямые, длиной 140 мм Нхтп/140 - "МИЗ-В"	2
Ножницы гоизонтально-изогнутые с пуговкой для разрезания повязок "МИЗ-В"	1
Ножницы хирургические с одним острым концом, длиной 140 мм Нхок/140 - "МИЗ-В"	2
Ножницы для перевязочного материала	1
Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5	2
Пинцет анатомический общего назначения ПА 200х2,5	2
Пинцет зубчато-лапчатый ПХ 150х5,5	1
Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5	3
Роторасширитель с кремальерой для принудительного раскрытия рта Рк - "МИЗ-В"	1
Скальпель брюшистый средний СБ 150х40	2
Скальпель остроконечный средний Со 150х40	1

Шпатель для языка двухсторонний прямой	2
Языкодержатель для взрослых	1
Тазик металлический медицинский почкообразный ТМП - "МИЗ-В"	1

4. Сведения о приемке

Набор специальный корабельный соответствует
ТУ 9437-297-07610776-2011 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

5. Сведения о приемке

Условия хранения 2 (С).

Срок защиты 5 лет при сроке транспортирования до 1 месяца.

Дата консервации

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации набора - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения набора – 5 лет.

7. Хранение

Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре воздуха от +40°C до -5°C и относительной влажности воздуха 60% при температуре +20°C.

Воздух не должен содержать примесей вызывающих коррозию.

8. Подготовка к работе

Изделия после расконсервации должны быть подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации. Дезинфекцию изделий проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре (120±4)°C в течение (45+5) мин.

Изделия, входящие в набор, подвергаются предстерилизационной очистке моющим раствором «Биолот» в следующей последовательности:

1. предварительное ополаскивание под проточной водой в течение (0,5+0,1) мин.
2. замачивания в моющем растворе при температуре (40+5) °C в течение (15+1) мин. при полном погружении.
3. мойка в течение (0,5+0,1) мин.
4. ополаскивание под проточной водой в течение (3+1) мин.
5. ополаскивание дистиллированной водой в течение (0,5+0,1) мин.
6. просушивание горячим воздухом при температуре (85+2-10) °C до полного исчезновения влаги.

Стерилизацию изделий проводит сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре (180+2-10)°C в течение (60+5) мин.

9. Сведения о рекламациях

Рекламации в установленном порядке вместе с паспортом предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 606120 г. Ворсма, Нижегородская обл., ул. Ленина, 86.