

ООО "Медкомпания"

Акционерное общество  
"Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,  
Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001,  
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44  
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru



ОКП 94 5210

РУ № ФСР 2010/07065 от 03.11.2015 г. ДС № РОСС RU Д-RU.АГ82.В.00691/18

**КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ КГ-1  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)  
Ц5040.00.000 ПС**



**Уважаемый Покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.  
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием,  
рекомендуем тщательно изучить настояще руководство по эксплуатации (паспорт)  
перед регулировкой и эксплуатацией.

Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

**1. Назначение**

1.1. Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 (в дальнейшем - кресло) предназначено для помещения на него женщин при гинекологических обследованиях, проведении различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах.

Кресло применяется в медицинских учреждениях.

Кресло изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 и 04.2 по ГОСТ Р 50444 в соответствии с требованиями ТУ 9452-021-07614107-2004.

**2. Технические характеристики**

Таблица 1

Длина (от подножки до спинки в разложенном виде)	1605 ± 50 мм
Ширина (по поясницам)	925 <sup>± 10</sup> мм
Высота кресла	1660 ± 50 мм
Высота кресла в разложенном виде	900 ± 30 мм
Масса	45 кг
Предельная рабочая нагрузка на кресло	180 кг
Углы наклона: - спинки от вертикали - сиденья от горизонтали (с предельным отклонением ± 5°)	20° - 100° 0° - 20°
Усилие, необходимое для перемещения тазика, не более	5 кг
Усилия, прилагаемые к рукояткам зажимов для фиксации съемных частей и к зажимному винту стойки, не более	10 кг
Усилие, необходимое для расфиксации спинки при переводе из одного положения в другое, не более	12 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет

**ВНИМАНИЕ!**

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием и улучшением данного изделия.

### 3. Комплектность

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Величина номинальной нагрузки, не более	Количество, штук
1	Кресло гинекологическое с ручным приводом (без съёмных частей)	60 кг - на спинку 120 кг - на сиденье 120 кг - на подножку	1
<b>Съёмные части</b>			
2	Подколеник	20 кг на каждый	2
3	Тазик или тазик со спливом	4 кг	1
4	Упор для рук правый	20 кг	1
5	Упор для рук левый	20 кг	1
<b>Эксплуатационная документация</b>			
6	Руководство по эксплуатации (паспорт)		1

3.1. Дополнительные съёмные части могут быть поставлены заказчику по отдельному договору с заводом-изготовителем.

3.2. Перечень дополнительных съёмных частей приведен в Таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Подголовник	
2	Столик инструментальный	1
3	Штатив для вливаний	1

### 4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

4.1. Основание 15 кресла снабжено двумя роликами 1 для передвижения, шарнирной подножкой 2, спинкой 7 и сиденьем 8 с механизмами наклонов и подушками 6, съёмными частями.

4.2. После получения креста, необходимо расплаковать его, установить съёмные части согласно рисунку 1 в необходимое положение и закрепить их винтами, зажимами 18 (СМ. пункт 4.5.).

4.3. Для регулировки наклона сиденья вывести тазик или тазик со спливом из зоны сиденья, поднять сажанку 11 вверх, повернуть в сторону буквы "П" (подъём) или "О" (опускание) движением рукятки 16 влево - вправо, регулировать наклон, при этом регулировку производить скобу сиденья при поднятых вверх стержней подколенника 3.

4.4. Для регулировки наклона спинки 7 поднять рукоятку 9 вверх, установленную на коробке 13, отрегулировать наклон, затем зафиксировать его нажатием рукоятки 9 вниз.

Во время регулировки наклона спинки 7 удерживать спинку рукой от падения.

4.5. Под сиденьем в кассете 20 разместить выдвижной тазик или тазик со спливом 19 для сбора жидкости. Кассету 20, при поставке не в сборе с креслом, установить согласно рисунку 1, закрепив ограничительные шайбы винтами на торцах направляющих после установки во втулках под сиденьем кресла.

4.6. Подножку 2 установить в необходимое положение.

4.7. Перед использованием съёмных частей 3 и 5 убедиться в надёжности их фиксации зажимами 18. При установке упоров для рук (правого и левого) 4 и 5 обратить внимание, чтобы лыска была расположена к зажимному винту.

4.8. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** регулировка частей с пациентом, размещенным на кресле, а также эксплуатация неисправного кресла.

Перед каждым использованием убедиться в надёжности фиксирования закрепления всех частей кресла.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

АДИОНОРНЕО ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")

зарегистрирована Министерской Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области от 14.05.2016 года, основной государственный регистрационный номер 1025201635205

Юридический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выksa, рабочий поселок Досчатое, Проммакерайон №619, участок «ДЗМО», здание 1, помещение 001

Телефон: +(7(33177) 4-80-62, Адрес электронной почты: dzmo@dzmo.ru

Генерального директора Кострова Андрея Владимировича

заявляет, что

Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 по ТУ 9452-021-07614107-2004 в комплектации съёмными частями:

- подколеник - 2 шт.;
- упор для рук - 2 шт.;
- тазик или тазик со спливом - 1 шт.;
- столик инструментальный - 1 шт.;
- подголовник - 1 шт.;
- штатив для вливаний - 1 шт.

Сертификат

издательства АДИОНОРНЕО ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")

Адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выksa, рабочий поселок Досчатое, Проммакерайон №19, участок «ДЗМО», здание 1, помещение 001

Фактический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выksa, рабочий поселок Досчатое, Проммакерайон №19, участок №3, здание №3; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание №5/1

Код ОКН: 034-2014-72-30-30-000, Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9402900000

соответствует требованиям

ГОСТ Р 50444-02 Разд. 3, 4

Лицензия на производство медицинского оборудования на основании Сертификата системы менеджмента качества ГОСТ ИСО 13485-2017 (ISO 13485:2016) № РСК.РУ.0001.Р194224 с 30.11.2018 по 29.11.2021 года, выданного ОС ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (аттестат акредитации № РОСС RU.31529.04ИКСС.0.001).

Государственного Уполномоченного на медико-техническое изделие № ФСР 2010/07065 от 03.11.2015 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДПОР).

10.12.2018

Срок действия лицензии до 09.12.2023

А.В. Костров

Сведения о регистрационном свидетельстве о соответствии:

Основной государственный регистрационный номер: 1107746918510.

Орган по сертификации: Администрация Областного центра с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испытаний»

117430, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 109, офис 506

Телефон +7(499)678-20-84, факс +7(499)678-20-84, адрес электронной почты info@metrcis.ru

Аттестат акредитации № РОСС RU.0001.11АГ92 дата выдачи 06.09.2015 года, выдан Федеральной службой по акредитации

Дата регистрации в реестре: регистрационный номер: Администрации РОСС.И.Д-Р.С.АТВ2.В.06691/18

М.П.

Ш.Н. Костров





1 - ролик; 2 - шарнирная подножка; 3 - подлокотник; 4 - упор для рук (левый); 5 - упор для рук (правый); 6 - подушка; 7 - спинка; 8 - сиденье; 9 - рукоятка; 10 - винт; 11 - собачка; 12 - регулируемая опора; 13 - коробка; 14 - стойка; 15 - основание; 16 - рукоятка; 17 - штатив для вливаний; 18 - винт зажим; 19 - таз или таз со сливом; 20 - кассета; 21 - подголовник; 22 - столик инструментальный.

Рисунок 1

##### 5. Техническое обслуживание

- 5.1. Перед вводом в эксплуатацию и перед эксплуатацией необходимо расконсервировать кресло промывкой моющими растворами, проверить отсутствие полных деталей, вмятин, коррозии металла, крепления всех болтовых и других видов соединений всех частей кресла, убедиться в надежности фиксирования и крепления, а при необходимости закрепить их, произвести санитарную обработку перед использованием и после окончания использования.
- 5.2. Проверку технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводите: проверкой углов наклона по пункту 1.5, спинки и сиденья с помощью любых доступных угломеров или средств; проверкой усилия по пунктам 1.6., 1.7., 1.8. с помощью динамометров ДПУ-0.2-2-УХЛ по ГОСТ 13837; проверкой работы механизма фиксации спинки размещением на ней равномерно-распределенной нагрузки 90 кг, после

выдержки в течение 2 часов спинка не должна смешаться вниз под нагрузкой; проверкой компактности по пункту 3 и других параметров.

5.3. Характерные неисправности кресла: ослабление крепёжных резьбовых и других элементов установки подтягиванием или заменой на годные элементы; затруднение наклона сиденья, упрятанного разборкой, при необходимости, заменой изношенных деталей на годные, последующим смазкой трущихся поверхностей консистентной смазкой и сборкой стакана с сиденьем и чехлом 10, установленных в стойке 14.

5.4. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором Мочевого средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

## 6. Консервация

- Металлические детали кресла и съёмных частей должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2°C со сроком реконсервации 3 года (масло консервационное НГ-20ЗА, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).
- Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 перевернуто в АО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-021-07614107-2004.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

## 7. Транспортирование и хранение

- Транспортирование кресла должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.
- Кресло должно храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°C до плюс 40°C, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°C и при более низких температурах без конденсации влаги.
- Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.
- Для перемещений кресла внутри помещений используются встроенные колесные опоры: приподнимите кресло за раму основания (наклоните в сторону сиденья) до отрыва от пола задних опор и переместите кресло в нужное место.
- При необходимости, отрегулируйте опоры.
- Для перемещения кресла по порогам, лестницам и в другое помещение - обязательно полностью поднимите кресло за раму основания, предназначенными для этого средствами достаточной грузоподъёмности.



Запрещается подъём, наклон или переноска кресла за спинку и съёмные приспособления - это может привести к механическим повреждениям и потерю гарантии производителя. Также, запрещается вставать (садиться) на спинку кресла.

## 8. Сведения об утилизации

Поскольку кресло не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

## 9. Гарантийные обязательства

- Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
- Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-021-07614107-2004.
- Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.
- В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.





## Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.



## Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильного заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.



## Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
  - наименования товара;
  - даты ввода товара в эксплуатацию;
  - описания дефекта товара и характера неисправности;
  - обстоятельства выявления дефекта;
  - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона (с голограммой).
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту [welcome@dzmo.ru](mailto:welcome@dzmo.ru).

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

тел.: (83177) 4-80-30 (многоканальный)  
[www.dzmo.ru](http://www.dzmo.ru)

## 10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

- 10.1. Истечение гарантийного срока.
- 10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
- 10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
- 10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
- 10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
- 10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

**ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

## 11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
  - наименования товара;
  - даты ввода товара в эксплуатацию;
  - описания дефекта товара и характера неисправности;
  - обстоятельства выявления дефекта;
  - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту [welcome@dzmo.ru](mailto:welcome@dzmo.ru).

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

## 12. Свидетельство о приемке

Красло-инженерическое  
с ручным приводом

Год: \_\_\_\_\_

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

КГ-1

Обозначение

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Сборщик / Упаковщик

ООО "Медкомплекс" А.В.К.



ДЗМО

производство медицинской техники с 1947 года

Место для  
голографии

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок и голографии производителя

Наименование товара КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ КГ-1

Серийный номер

Дата производства

Гарантийный срок

со дня продажи

12 месяцев

Заполняет продающая организация

Наименование продающей организации

Дата продажи

ФИО / Подпись

м.п.

Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.  
К комплектации и внешнему виду  
товара претензий не имею.

Наименование покупателя

ФИО / Подпись

м.п.