6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- 6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
 - при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации и хранения;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. Свидетельство о приемке.

Стол пеленальный СП.04.00

Соответствует ТУ 9452-003-68690950-2014

Серийный номер	
Дата выпуска изделия:	
Упаковщик:	

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230. Фактический адрес: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18

E-mail: <u>zakaz@tdask.ru</u> www.tdask.ru

ООО Медицинская Компания



Паспорт

Наименование	Арт.
Стол пеленальный (смотровой) (вид 303440)	СП.04.00



ТУ 9452-003-68690950-2014

г. Нижний Новгород

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- 6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
 - при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации и хранения;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. Свидетельство о приемке.

Стол пеленальный СП.04.00

Соответствует ТУ 9452-003-68690950-2014

Серийный номер	
Дата выпуска изделия:	
Упаковщик:	

Предприятие-изготовитель: ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230. Фактический адрес: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18

E-mail: <u>zakaz@tdask.ru</u> www.tdask.ru

ООО Медицинская Компания



Паспорт

Наименование	Арт.
Стол пеленальный (смотровой) (вид 303440)	СП.04.00



ТУ 9452-003-68690950-2014

г. Нижний Новгород

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Стол предназначен для пеленания детей.
- 1.2. Ложе изготовлено из пластика. Каркас выполнен из труб №32 мм и №20 мм, окрашенных методом порошковой полимерной окраски. Предусмотрена полка для пеленок.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм		Масса, кг	
Ширина	Глубина	Высота	не более
600	700	950	15

3.Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Пластиковая столешница	1
3.2	Боковина	2
3.3	Стяжка боковины	2
3.4	Полка (610х600)	1
3.5	Болт мебельный M10x35	4
3.6	Шайба T10	4
3.7	Пистон пластиковый	4
3.8	Саморез 4.2х30	4
3.9	Матрац	1
3.10	Паспорт	1
3.11	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестообразная отвертка и ключ на 10 мм.

4.1. Распаковать компоненты стола.

- 4.2. Соединить боковины 3.2 с помощью стяжек 3.3 закрепив их болтами 3.5 с шайбами 3.6.
- 4.3. Установить пластиковую столешницу 3.1 на каркас, закрепить ее через отверстия пистонами 3.7.
- 4.4. Положить полку 3.4 на поперечины боковин 3.2, закрепить ее через отверстия в поперечинах саморезами 3.8.

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
- 5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.
- 5.3. Условия транспортирования оборудования крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
- 5.4. Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.
- 5.5. Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.
- 5.6. Хранение оборудования в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.
- 5.7. Оборудование предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Стол предназначен для пеленания детей.
- 1.2. Ложе изготовлено из пластика. Каркас выполнен из труб №32 мм и №20 мм, окрашенных методом порошковой полимерной окраски. Предусмотрена полка для пеленок.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг
Ширина	Глубина	Высота	не более
600	700	950	15

3.Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Пластиковая столешница	1
3.2	Боковина	2
3.3	Стяжка боковины	2
3.4	Полка (610х600)	1
3.5	Болт мебельный M10x35	4
3.6	Шайба T10	4
3.7	Пистон пластиковый	4
3.8	Саморез 4.2х30	4
3.9	Матрац	1
3.10	Паспорт	1
3.11	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестообразная отвертка и ключ на 10 мм.

4.1. Распаковать компоненты стола.

- 4.2. Соединить боковины 3.2 с помощью стяжек 3.3 закрепив их болтами 3.5 с шайбами 3.6.
- 4.3. Установить пластиковую столешницу 3.1 на каркас, закрепить ее через отверстия пистонами 3.7.
- 4.4. Положить полку 3.4 на поперечины боковин 3.2, закрепить ее через отверстия в поперечинах саморезами 3.8.

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
- 5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.
- 5.3. Условия транспортирования оборудования крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
- 5.4. Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.
- 5.5. Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.
- 5.6. Хранение оборудования в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.
- 5.7. Оборудование предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.