

Оптическая система, состоящая из линзы или нескольких линз, предназначенная для увеличения и наблюдения мелких предметов – биноклярная лупа серии laboMED.

Вы приобрели фирменный продукт от Eschenbach (Эшенбах), который был произведен в Германии в соответствии с самыми современными производственными процессами. Перед первым использованием вы должны внимательно прочитать эти инструкции, чтобы ознакомиться со всеми функциями устройства.

#### Инструкции по технике безопасности

- ✓ Этот продукт – не игрушка! Внимание! Запрещается использование детьми младше 4 лет. Использование детьми младше 6 лет возможно только под присмотром взрослых.
- ✓ Опасность возгорания! Линзы, используемые в оптических приборах, могут нанести значительный ущерб за счет генерирования тепла сфокусированными лучами при неправильном обращении и хранении. НИКОГДА не оставляйте оптические линзы открытыми под прямыми солнечными лучами.
- ✓ Опасность ослепления и травмы! НИКОГДА не смотрите на солнце или другие яркие источники света с помощью оптических устройств!
- ✓ Берегите ваш оптический прибор от ударов, воздействия влаги и высокой температуры. Никогда не кладите laboMED на отопительные приборы и не оставляйте под прямыми солнечными лучами.
- ✓ laboMED нельзя использовать во время вождения автомобиля!
- ✓ Убедитесь, что другие люди, особенно дети, знают об этих рисках!

#### Состав прибора:

1. Биноклярная лупа.
2. Корпус для лупы.
3. Налобная опора с вентиляционными отверстиями.
4. Эластичный ремень с липучкой.
5. Инструкция по использованию.

#### Замена лупы

Для замены лупы вытащите её из рамки корпуса. Затем в рамку может быть вставлена другая лупа. Просто убедитесь, что изогнутая поверхность лупы является её внешней стороной. Биноклярная лупа вставляется в адаптер. laboMED доступен с различными увеличениями. Существует определенное рабочее расстояние (расстояние между лупой и просматриваемым объектом) для каждого увеличения, которое необходимо сохранить для получения оптимального качества изображения. Дополнительные индивидуальные линзы можно заказать по следующему артикулам:

артикул	увеличение	рабочее расстояние
16455	1.7x	≈ 400 мм
16451	2.0x	≈ 250 мм
16452	2.5x	≈ 180 мм
16453	3.0x	≈ 160 мм
16454	4.0x	≈ 55 мм
16457	7.0x	≈ 32 мм

#### Использование laboMED

Оптимальное качество изображения с помощью laboMED должно быть получено, когда вы поддерживаете рекомендуемое расстояние между лупой и просматриваемым объектом, определенное для вас, для используемого вами увеличения. Это значение (в мм) можно найти в таблице в данной инструкции.

#### Инструкции по уходу

Все лупы ESCHENBACH производятся из PXM®, оптически чистого пластика с удобными для пользователя характеристиками:

- легкое стекло;
- оптически чистые, для лучшего качества просмотра лупы PXM® покрываются специальным способом, устойчивы к царапинам, получают постоянное антистатическое покрытие.

Видимые волосяные трещины, которые могут быть видны вдоль края линзы, не ухудшают оптическое изображение. Это поточные линии материала, которые возникают во время производства.

При очистке laboMED не используйте мыльные растворы, содержащие смягчающие компоненты, спиртовые или органические растворители, а также абразивные чистящие средства! Линзы могут быть повреждены!

Не очищайте laboMED в ультразвуковой ванне или в проточной воде!

Очистите laboMED мягкой тканью без ворса (например, салфеткой для очков). Для устранения более тяжелого загрязнения (например, отпечатков пальцев) слегка смочите ткань.

Возможно дополнительно заказать светодиодную подсветку для крепления на laboMED (артикул 160422).

Оптическая система, состоящая из линзы или нескольких линз, предназначенная для увеличения и наблюдения мелких предметов – биноклярная лупа серии laboMED.

Вы приобрели фирменный продукт от Eschenbach (Эшенбах), который был произведен в Германии в соответствии с самыми современными производственными процессами. Перед первым использованием вы должны внимательно прочитать эти инструкции, чтобы ознакомиться со всеми функциями устройства.

#### Инструкции по технике безопасности

- ✓ Этот продукт – не игрушка! Внимание! Запрещается использование детьми младше 4 лет. Использование детьми младше 6 лет возможно только под присмотром взрослых.
- ✓ Опасность возгорания! Линзы, используемые в оптических приборах, могут нанести значительный ущерб за счет генерирования тепла сфокусированными лучами при неправильном обращении и хранении. НИКОГДА не оставляйте оптические линзы открытыми под прямыми солнечными лучами.
- ✓ Опасность ослепления и травмы! НИКОГДА не смотрите на солнце или другие яркие источники света с помощью оптических устройств!
- ✓ Берегите ваш оптический прибор от ударов, воздействия влаги и высокой температуры. Никогда не кладите laboMED на отопительные приборы и не оставляйте под прямыми солнечными лучами.
- ✓ laboMED нельзя использовать во время вождения автомобиля!
- ✓ Убедитесь, что другие люди, особенно дети, знают об этих рисках!

#### Состав прибора:

6. Биноклярная лупа.
7. Корпус для лупы.
8. Налобная опора с вентиляционными отверстиями.
9. Эластичный ремень с липучкой.
10. Инструкция по использованию.

#### Замена лупы

Для замены лупы вытащите её из рамки корпуса. Затем в рамку может быть вставлена другая лупа. Просто убедитесь, что изогнутая поверхность лупы является её внешней стороной. Биноклярная лупа вставляется в адаптер. laboMED доступен с различными увеличениями. Существует определенное рабочее расстояние (расстояние между лупой и просматриваемым объектом) для каждого увеличения, которое необходимо сохранить для получения оптимального качества изображения. Дополнительные индивидуальные линзы можно заказать по следующему артикулам:

артикул	увеличение	рабочее расстояние
16455	1.7x	≈ 400 мм
16451	2.0x	≈ 250 мм
16452	2.5x	≈ 180 мм
16453	3.0x	≈ 160 мм
16454	4.0x	≈ 55 мм
16457	7.0x	≈ 32 мм

#### Использование laboMED

Оптимальное качество изображения с помощью laboMED должно быть получено, когда вы поддерживаете рекомендуемое расстояние между лупой и просматриваемым объектом, определенное для вас, для используемого вами увеличения. Это значение (в мм) можно найти в таблице в данной инструкции.

#### Инструкции по уходу

Все лупы ESCHENBACH производятся из PXM®, оптически чистого пластика с удобными для пользователя характеристиками:

- легкое стекло;
- оптически чистые, для лучшего качества просмотра лупы PXM® покрываются специальным способом, устойчивы к царапинам, получают постоянное антистатическое покрытие.

Видимые волосяные трещины, которые могут быть видны вдоль края линзы, не ухудшают оптическое изображение. Это поточные линии материала, которые возникают во время производства.

При очистке laboMED не используйте мыльные растворы, содержащие смягчающие компоненты, спиртовые или органические растворители, а также абразивные чистящие средства! Линзы могут быть повреждены!

Не очищайте laboMED в ультразвуковой ванне или в проточной воде!

Очистите laboMED мягкой тканью без ворса (например, салфеткой для очков). Для устранения более тяжелого загрязнения (например, отпечатков пальцев) слегка смочите ткань.

Возможно дополнительно заказать светодиодную подсветку для крепления на laboMED (артикул 160422).

Биноклярная лупа серии laboMED используется во многих областях человеческой деятельности, в том числе в биологии, медицине, археологии, банковском и ювелирном деле, криминалистике, при ремонте часов и радиоэлектронной техники, а также в филателии, нумизматике и бонистике; при чтении мелкого шрифта дома, ценников, информации о продуктах, аннотации к лекарствам и прочее.

Изготовлено из высококачественных материалов. Сделано в Германии.

Соответствует требованиям Росздравнадзора, зарегистрировано в РФ и внесено в Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (РУ РЗН № 2016/4502 от 26.07.2016).

Соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 51932-2002, ГОСТ 25706-83 (Пп. 1.1, 1.2, 2.4-2.13)

Изготовитель: «Eschenbach Optik GmbH» (Эшенбах Оптик ГмбХ), Schopenhauerstraße 10, D-90409 Nürnberg (Шопенгауэрштрассе 10, Д-90409 Нюрнберг).

Импортер, эксклюзивный дистрибьютор торговой марки «Eschenbach» на территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси: ООО «Мир зрения»

107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15, офис 512.

тел.: +7 (495) 18-19-202, (962) 978-80-82, (903) 524-11-60;

вебсайт: [www.mirzreniya.ru](http://www.mirzreniya.ru); адрес электронной почты: [info@mirzreniya.ru](mailto:info@mirzreniya.ru)

Товар не подлежит обязательной сертификации



Срок службы: согласно требованиям, ГОСТ 25706-83.

**ESCHENBACH**



#### Гарантия

В рамках действующего законодательства мы предоставляем гарантию 12 месяцев со дня продажи на функционирование продукта, описанного в данном руководстве, в отношении неисправностей, возникающих в связи с производственными дефектами или браком. В случае повреждения, вызванного неправильным обращением, в том числе повреждением от падения или ударов, претензии по гарантии не принимаются.

#### Гарантийный талон:

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Наименование продавца: \_\_\_\_\_

М.П.

Биноклярная лупа серии laboMED используется во многих областях человеческой деятельности, в том числе в биологии, медицине, археологии, банковском и ювелирном деле, криминалистике, при ремонте часов и радиоэлектронной техники, а также в филателии, нумизматике и бонистике; при чтении мелкого шрифта дома, ценников, информации о продуктах, аннотации к лекарствам и прочее.

Изготовлено из высококачественных материалов. Сделано в Германии.

Соответствует требованиям Росздравнадзора, зарегистрировано в РФ и внесено в Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (РУ РЗН № 2016/4502 от 26.07.2016).

Соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 51932-2002, ГОСТ 25706-83 (Пп. 1.1, 1.2, 2.4-2.13)

Изготовитель: «Eschenbach Optik GmbH» (Эшенбах Оптик ГмбХ), Schopenhauerstraße 10, D-90409 Nürnberg (Шопенгауэрштрассе 10, Д-90409 Нюрнберг).

Импортер, эксклюзивный дистрибьютор торговой марки «Eschenbach» на территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси: ООО «Мир зрения»

107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15, офис 512.

тел.: +7 (495) 18-19-202, (962) 978-80-82, (903) 524-11-60;

вебсайт: [www.mirzreniya.ru](http://www.mirzreniya.ru); адрес электронной почты: [info@mirzreniya.ru](mailto:info@mirzreniya.ru)

Товар не подлежит обязательной сертификации



Срок службы: согласно требованиям, ГОСТ 25706-83.

**ESCHENBACH**



#### Гарантия

В рамках действующего законодательства мы предоставляем гарантию 12 месяцев со дня продажи на функционирование продукта, описанного в данном руководстве, в отношении неисправностей, возникающих в связи с производственными дефектами или браком. В случае повреждения, вызванного неправильным обращением, в том числе повреждением от падения или ударов, претензии по гарантии не принимаются.

#### Гарантийный талон:

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Наименование продавца: \_\_\_\_\_

М.П.

