

Внимание: приобретаемое изделие отмечено «галочкой»-

<input checked="" type="checkbox"/>	Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм	Объем, м3	Вес, кг
	Матрац противопролежневый полиуретановый	ВиЦыАн-МПП-ВП-01	2000*800*120	0,19	5,4
	Матрац противопролежневый полиуретановый	ВиЦыАн-МПП-ВП-02	2000*850*120	0,2	5,6
	Матрац противопролежневый полиуретановый	ВиЦыАн-МПП-ВП-03	2000*900*120	0,21	5,9
	Матрац противопролежневый полиуретановый	ВиЦыАн-МПП-ВП-06	2000*800*100	0,16	4,7
	Матрац противопролежневый полиуретановый	ВиЦыАн-МПП-ВП-07	2000*850*100	0,17	4,9
	Матрац противопролежневый полиуретановый	ВиЦыАн-МПП-ВП-08	2000*900*100	0,18	5,2
	Матрац противопролежневый полиуретановый (с натуральным латексом)	ВиЦыАн-МПП-ВП-Л-04	2000*900*130	0,16	3,1
	Матрац противопролежневый полиуретановый (с натуральным латексом)	ВиЦыАн-МПП-ВП-Л-05	2000*800*130	0,21	5,9
	Матрац противопролежневый полиуретановый (с натуральным латексом)	ВиЦыАн-МПП-ВП-Л-06	2000*850*130	0,22	6,2

**ВиЦыАн**  
Разработка и производство изделий  
медицинского назначения

## Матрацы беспружинные «ВиЦыАн»

### Паспорт-инструкция

- Матрац противопролежневый полиуретановый
- Матрац противопролежневый полиуретановый (с натуральным латексом)



### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

### Назначение изделия

Матрац предназначен для настила на кровать поверх ложа. Для комфортного сна.

### Технические характеристики

Матрац изготовлен из эластичного пенополиуретана марки ST25/36 со специальным трапециевидным профилем, с эффектом "воздушной подушки", который способствует лучшему распределению давления на тело пациента, снизу поперечный профиль, придающий матрацу гибкость и способность принимать форму 2-3-4-секционной кровати. Влагонепроницаемый съемный чехол матраца изготовлен из синтетической ткани (полиэстер 100%) плотностью 210 г/м<sup>2</sup> с антибактериальным паропроницаемым полиуретановым покрытием. На чехле вшита молния. Матрац упакован в полиэтиленовый мешок.

**Количество мест – 1**

### Комплектация

В комплект входит матрац – 1шт  
Чехол (наматрасник) съемный – 1шт  
Упаковка – 1шт  
Паспорт инструкция – 1шт

Декларация о соответствии № RU Д-RU.AB29.B.24135 от 28.04.2016г. (до 27.04.2021), ТУ 5614-001-97965187-2013

### Дата изготовления

5 декабря 2016 г.

### Способ утилизации

Изделие утилизируется вместе с бытовым мусором.

ООО "Компания ВиЦыАн"

450103, Республика Башкортостан, г.Уфа, Академика Ураксина д.3  
+7 (347) 29-59-103; [office@vitsyan.ru](mailto:office@vitsyan.ru), [www.vitsyan.ru](http://www.vitsyan.ru)

### Правила использования

Перед использованием снимите с матраца полиэтиленовую упаковку и уложить на кровать.

Не кладите матрац на сломанное или не предназначенное для этого основание. Не кладите матрац на неровное основание, на основания разного уровня, на решетчатое основание, если зазор между рейками превышает 5 см. Это может сказаться на форме матраца и сократить срок его службы.

Не кладите матрац на основание неподходящего размера. Матрац в кровати должен располагаться свободно (внутренние размеры кровати не должны быть меньше размеров матраца).

Не используйте матрац для глаженья – это может привести к необратимым повреждениям покрытия матраца.

Эксплуатировать изделие в сухих помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 85% (при +25°C).

Изделие нельзя подвергать резким механическим воздействиям (прыгать, ходить по матрацу, ронять).

Матрацы требуют своевременной (в зависимости от загрязнения) дезинфекции и сушки.

### Правила ухода за изделием

Чистку матраца нужно осуществлять только с использованием специальных щадящих чистящих средств, не содержащих хлора и органические растворители.

### Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

### Условия транспортировки

Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах.

### Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил эксплуатации и ухода. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.