

### 8. Свидетельство о приемке

Мебель медицинская – кушетка-стол массажная КСМ-02,  
№ \_\_\_\_\_ изготовлена и принята в  
соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,  
действующих технических условий ТУ 9452-001-18732063-2016 и признана годной к  
эксплуатации.

\_\_\_\_\_  
Дата производства

Отметка ОТК

**Производитель:**  
ООО «ХИТЭК-ГРУП»  
107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 29, стр.2  
Тел.: 8 (495) 995-995-9  
[www.med-engineering.ru](http://www.med-engineering.ru)



## ПАСПОРТ Мебель медицинская Кушетка-стол массажная КСМ-02



**Арт. КСМ-02**

## **Мебель медицинская Кушетка-стол массажная арт. КСМ-02**

### **1. Назначение**

Мебель медицинская – кушетка-стол массажная КСМ-02 (далее – кушетка) предназначена для оснащения кабинетов, в том числе косметологических и массажных, палат и лабораторий клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений. Изделие используется для проведения массажных и косметических процедур.

### **2. Описание**

2.1 Кушетка изготовлено в соответствии с требованиями ТУ 9452-001- 18732063-2016 и имеет РУ №РЗН 2017/5682 от 20.04.2017.

2.2 Каркас кушетки изготовлен из стальных профильных труб с нанесением порошкового полимерного покрытия.

2.3 Мягкие элементы выполнены из ДСП, на которую уложен слой поролона, обтянуты искусственной кожей.

2.4 Кушетка поставляется в собранном и разобранном виде.

Инструкция по сборке прилагается.

### **3. Технические характеристики**

3.1 Габаритные размеры:

Высота — 730 мм

Длина — 2000 мм

Ширина — 710 мм

3.2 Угол наклона головной секции - от 0 до +45°

3.3 Допускаемая распределённая нагрузка (не более) 160 кг на ложе; 15 кг на подголовник

3.4 Масса изделия не более 31 кг:

3.5 Материалы, входящие в состав изделия: сталь, ДСП 16 мм, поролон, искусственная кожа, спанбонд.

3.6 Срок службы изделия – не менее 6 лет.

### **4. Комплектность**

В комплект поставки входит:

- изделие в разобранном или в собранном виде - 1 шт.
- паспорт, содержащий инструкцию по эксплуатации – 1 шт.
- инструкция по сборке – 1 шт.
- гарантийный талон – 1 шт.

Информация о каркасных деталях, крепежных изделиях и мягких элементах, входящих в комплект поставки, содержится в таблице

### **5. Правила эксплуатации и меры безопасности.**

5.1. Использовать кушетку только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок.

5.2. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства или 1% раствором монохлорамина ХБ. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей.

5.3. Изделия не предназначены для эксплуатации вне помещения.

5.4. При использовании необходимо руководствоваться указаниями инструкции по эксплуатации.

5.5. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

### **6. Хранение и транспортировка**

6.1. Транспортировка изделия осуществляется в заводской упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

-упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°С до +40°С.

6.2. Изделие может храниться в течение 5 лет в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°С до +40°С.

- относительная влажность при температуре окружающей среды +25°С не более 80%.

- отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

### **7. Гарантийные обязательства.**

7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

7.2. На механические повреждения мягких элементов изделия, полученные в процессе эксплуатации (порезы, царапины, потёртости, пятна от воздействия агрессивных химических веществ), данная гарантия не распространяется.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи конечному покупателю.

7.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить гарантийный талон, товарно-транспортную накладную (или УПД), рекламацию и фото/видео материалы, которые могут помочь определить проблему.

7.5. Гарантийное обслуживание производится по адресу:

107076, г. Москва, ул. Электровзводская д.29 стр. 2, 4 этаж, тел. (495) 642-86-62, 988-76-60, E-mail: [service@med-engineering.ru](mailto:service@med-engineering.ru)