

ООО "МедКомплекс "А.В.К."



ОКП 94 5210

РУ № ФСР 2012/14093 от 12.11.2015 г. ДС № РОСС RU Д-РУ.АГ82.В.00731/18

**СТОЛИК ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ СЗК-"ДЗМО"
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
СЗК.00.00 ПС**



Акционерное общество
"Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001,
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

**Уважаемый Покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
 Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед эксплуатацией.
 Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Столик для забора крови СЗК-«ДЗМО» (в дальнейшем - столик) предназначен для удобства забора крови или внутривенных манипуляций в кабинетах медицинских и лечебно-профилактических учреждениях.

Столик изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444 в соответствии с требованиями ТУ 9452-060-076.14107-2012.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Длина	550 ±50 мм
Ширина	370 ± 50 мм
Высота	300 ± 20 мм
Масса	10 кг
Предельная рабочая нагрузка на столик, не более	30 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

3. Комплектность

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Столик для забора крови СЗК-«ДЗМО»	1
	Эксплуатационная документация	
2	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

Примечание:

Допускается поставка в разобранном виде, крепежные изделия при этом устанавливаются в местах их креплений или уложенные в отдельный пакет.

4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

4.1. Столик для забора крови, изображенный на рисунке 1, имеет каркас, выполненный из стальных труб, с нанесением полимерно-порошкового покрытия и состоит из двух боковин 1 и двух стоек 2.

4.2. Верхняя часть - панель 3 выполнена из фанерного листа, поролон и обтянута искусственной кожей.

4.3. Столик установлен на четыре регулируемые опоры 4, что обеспечивает устойчивое положение даже на неровном полу.

4.4. Порядок сборки столика:

4.4.1. Для подготовки к работе, необходимо распаковать и очистить от упаковочного материала, удалить антикоррозионную смазку протиранием насухо тампоном из марли, смоченным спиртом.

4.4.2. Взять боковины 1, закрепить на них верхнюю часть - панель 3 при помощи болтов с шайбами согласно рисунку 1. Затем установит две стяжки при помощи болтов с шайбами. Закрепить регулируемые опоры 4 на соответствующие места к боковинам 1 и законтрить соединение гайками М8. Все резьбовые соединения должны быть прочно затянуты. Выполнить санитарную обработку столика.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТНИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")**

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области от 14.05.2016 года, основной государственный регистрационный номер 1025201635205

Юридический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проминквартал №19, участок «ДЗМО», здание 1, помещение № 001
 Телефон: +7(83177) 4-80-62, Адрес электронной почты: dzmo@dzmo.ru

в лице Генерального директора Кострова Андрея Владимировича

заявляет, что Набор медицинской мебели для процедурных кабинетов по ТУ 9452-060-076.14107-2012 в составе:

- подставка для тазов, ПТ-"ДЗМО",
- подставка для стерилизационных коробов (биксов), ПСК-"ДЗМО",
- столик для забора крови, СЗК-"ДЗМО",
- стул медицинский, СМ-1 "ДЗМО",
- набор изданий, ТМ-1 "ДЗМО".

Принадлежности:

- подставка для ног,
- газовая пружина

Серийный выпуск

изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТНИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")

Адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проминквартал №19, участок «ДЗМО», здание 1, помещение № 001

Фактический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проминквартал №19, участок «ДЗМО», здание 1, помещение № 001

Адрес производства: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проминквартал №19, участок №3, здание №3/2; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание №5/1

Код ОК 034-2014: 32.50.50.000, Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9402 90 000 0

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4

Декларация принята на основании Сертификата системы менеджмента качества ГОСТ ISO 13485-2016 (ISO 13485:2016) № РСК.RU.0001.P394224 с 30.11.2018 по 29.11.2021 года, выданного ОС ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (аттестат аккредитации РОСС RU.11529.041830.001).

Регистрационного удостоверения на медицинское изделие № ФСР 2012/14093 от 12.11.2015 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).

Декларация действительна с 11.12.2018

Декларация действительна до 10.12.2023

М.П. А.В. Костров

Свидетель о соответствии № 1711420/18

Основной государственный регистрационный номер: 1107-46918510.

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испытаний»

117420, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, офис 903

Телефон +7(499)678-20-84, факс +7(499)678-20-84, адрес электронной почты info@mercis.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11A182 дат вступления в реестр аккредитованных лиц 04.09.2015 года, выдан Федеральной службой по аккредитации


Дата регистрации 11.12.2018 Регистрационный номер декларации РОСС RU Д-АУ.182.В.00731/18

М.П. Ш.Н. Фурсов



4.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 4.5.1. Эксплуатация неисправного столика.
- 4.5.2. Самостоятельный ремонт столика неуполномоченными заводом-изготовителем лицами.
- 4.5.3. Препятствовать свободному перемещению подвижных механизмов столика во избежание получения травм и увечий.

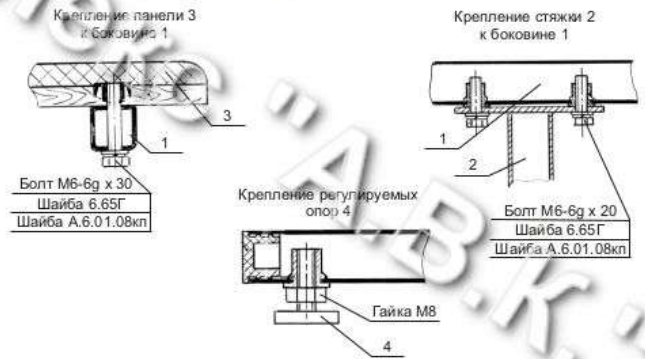

1 - боковина; 2 - стяжка; 3 - панель; 4 - регулируемая опора.

Рисунок 1

5. Техническое обслуживание

- 5.1. Перед вводом в эксплуатацию и перед использованием расконсервируйте столик, промойте моющими растворами, проверьте отсутствие погнутых деталей, вмятин, коррозии металла, крепление всех болтовых и других видов соединений всех частей столика, убедитесь в надежности фиксирования и крепления, при необходимости закрепите их.
- 5.2. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлоромина по ТУ 6-01-2989387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.
- 5.3. Характерные неисправности столика: ослабление крепежных резьбовых и других элементов. Устраните их подтягиванием или заменой на годные элементы.



Не используйте химические чистящие средства и растворители.
Не применяйте механические приспособления для чистки и дезинфекции.

6. Консервация

- 6.1. Металлические детали столика должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2°C со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или 1-17 ГОСТ 19877-76).
- 6.2. Столик для забора крови СЗК-ДЗМО подвергнут в АО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документации и техническим условиям ТУ 9452-060-07614107-2012.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, Ф.И.О. и подпись
	Консервация	3	

7. Транспортирование и хранение

- 7.1. Транспортирование столика должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.
- 7.2. Столик должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°C до плюс 40°C, при относительной влажности 80% при температуре плюс 25°C и при более низких температурах без конденсации влаги.
- Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8. Сведения об утилизации

Поскольку столик не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
- 9.2. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-060-07614107-2012.
- 9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.
- 9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

- 10.1. Истечение гарантийного срока.
- 10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
- 10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
- 10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
- 10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
- 10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.





Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.



Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.



Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельств выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона (с голограммой).
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:

- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию;
- описания дефекта товара и характера неисправности;
- обстоятельств выявления дефекта;
- контактной информации ответственного лица.

2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.

3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

12. Свидетельство о приемке

Столик для забора крови

СЗК-ДЗМО

Наименование изделия

Обозначение

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Сборщик / упаковщик

ООО "МедКомплекс "А.В.К."



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок и голограммы производителя

Наименование товара	СТОЛИК ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ СЗК-"ДЗМО"		
Серийный номер		Дата производства	
Гарантийный срок	12 месяцев	со дня продажи	

Заполняет продающая организация

Наименование продающей организации		
Дата продажи		
ФИО / Подпись		

Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
К комплектации и внешнему виду товара претензий не имею.

Наименование покупателя		
ФИО / Подпись		

