

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К КРОВАТИ ОБЩЕБОЛЬНИЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ СЕРИИ КМ :РАМА БАЛКАНСКОГО КМ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначена для скорейшей активизации лежащих пациентов, как правило в посттравматический или постоперационный период, для горизонтального и/или вертикального скелетного вытяжения. Можно использовать как в стационарах, так и в домашних условиях.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 19120-93.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: рама Балканского, набор фурнитуры, руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование изделия	Габариты (ВхД), мм	Вес, кг
Рама Балканского КМ	1400x2190	10

Отклонение веса указанного в таблице - $\pm 10\%$

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для продления срока службы рекомендуется производить:

- осмотр подвижных соединений (надежность их фиксации к раме ложа)

В случае обнаружения ослабленных соединений – затянуть болты ключом.

Рама выдерживает нагрузку массой не более 50 кг.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Рама Балканского может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Рама Балканского в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре -50°C... +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Боковые ограждения изготовлены ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К КРОВАТИ ОБЩЕБОЛЬНИЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ СЕРИИ КМ :РАМА БАЛКАНСКОГО КМ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначена для скорейшей активизации лежащих пациентов, как правило в посттравматический или постоперационный период, для горизонтального и/или вертикального скелетного вытяжения. Можно использовать как в стационарах, так и в домашних условиях.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 19120-93.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: рама Балканского, набор фурнитуры, руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование изделия	Габариты (ВхД), мм	Вес, кг
Рама Балканского КМ	1400x2190	10

Отклонение веса указанного в таблице - $\pm 10\%$

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для продления срока службы рекомендуется производить:

- осмотр подвижных соединений (надежность их фиксации к раме ложа)

В случае обнаружения ослабленных соединений – затянуть болты ключом.

Рама выдерживает нагрузку массой не более 50 кг.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Рама Балканского может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Рама Балканского в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре -50°C... +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Боковые ограждения изготовлены ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____