

**ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ ТУП  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)  
тЦДЗ.531.003.ПС (разборная)**


**Уважаемый Покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.  
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием,  
рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт)  
перед эксплуатацией.  
Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

**1. Назначение**

1.1. Тележка для уборки помещений ТУП (в дальнейшем - тележка) предназначена для внутрикорпусной транспортировки приспособлений и принадлежностей, необходимых для уборки помещений в лечебных учреждениях и сбора мусора. Тележку изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2. по ГОСТ Р 50444 в соответствии с требованиями ТУ 9451-031-076 14107-2005.

**2. Технические характеристики**

Таблица 1

Габаритные размеры тележки:	
- длина	920 ± 10 мм
- ширина	500 ± 20 мм
- высота	918 ± 20 мм
Габаритные размеры емкости для сбора мусора:	
- длина	390 ± 15 мм
- ширина	250 ± 10 мм
- глубина	670 ± 15 мм
Масса	13,6 кг
Предельная рабочая нагрузка на тележку	60 кг
Усилие, необходимое для перемещения тележки с предельной рабочей нагрузкой, не более	10 кг
Усилие, прикладываемое к педали тормоза колеса при его торможении, не более	15 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет

**ВНИМАНИЕ!**

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

Акционерное общество  
"Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,  
Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001,  
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44  
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

### 3. Комплектность

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Основание	1
2	Рама	1
3	Скобы	1
4	Ёмкость навесная	1
5	Пакет полиэтиленовый	1
6	Лоток	1
7	Болт М8х16	4
Эксплуатационная документация		
8	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

#### Примечание:

1. Допускается поставка тележки в разобранном виде, крепежные изделия при этом устанавливаются в местах их креплений или уложенные в отдельный пакет.
2. По отдельному заказу тележка может быть укомплектована шваброй, щеткой, ведром и т.п..

#### 4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указания мер безопасности

- 4.1. Тележка состоит из основания 1, установленного на четыре самоориентирующихся колеса 7 и 8, скобы 2, одновременно выполняющие роль ручек, рамы 3, соединяющей основание 1 со скобой 2, съемного лотка 6, установленного в раму основания, на которой ставится ведро и приспособления для уборки, ёмкость 4, пакета 5 для сбора мусора и четырех амортизаторов 9, которые служат для смягчения удара при наезде на препятствие.
- 4.2. Для подготовки к работе, необходимо распаковать тележку и очистить ее от упаковочного материала, удалить антикоррозийную смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или бензином, провести санитарную обработку горячей водой с моющими средствами и последующую просушку.
- 4.3. При получении тележки в разобранном виде, произвести сборку согласно рисунку 1.
- 4.4. Проверить комплектность.
- 4.5. Для затормаживания колеса 8 нажать на педаль 10.
- 4.6. Растормаживание колеса производить поворотом педали в исходное положение.
- 4.7. Перед перемещением тележки растормозить колеса.
- 4.7. При загрязнении полиэтиленового пакета 5 заменить его на чистый, или загрязненный промыть и подвергнуть санитарной обработке.
- 4.8. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** эксплуатация тележки с неисправными тормозами, другими погнутыми, изношенными или поломанными частями и их креплениями.

#### 5. Техническое обслуживание

- 5.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений; замене, при необходимости, гонными деталями изношенных или поломанных; смазке раз в год подшипников колёс.
- 5.2. Проверка технического состояния в целях установления возможности дальнейшего использования тележки, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колёс.
- 5.3. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлорина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**  
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")**

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области от 14.05.2016 года, основной государственный регистрационный номер 1025201635205

Юридический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», Здание 1, Помещение 001  
 Телефон: +7(83177) 4-89-52. Адрес электронной почты: dzmo@dzmo.ru

в лице Генерального директора Костров Андрей Владимирович  
 заявляет, что  
 Тележка для уборки помещений ТУП по ТУ 9451-031-076 (4107-2005)

Серийный выпуск

изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")  
 Адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», Здание 1, Помещение 001  
 Фактический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», Здание 1, Помещение 001  
 Адрес производства: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок №1, здание №32; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание №5а  
 Код ОК 034-2014: 32.30.50.090. Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8716 80 000 0

соответствует требованиям  
 ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4, ГОСТ Р 51084-97 Разд. 6, 8

Декларация принята на основании Сертификата системы менеджмента качества ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016) № РСК.RU.0001.Р394234 с 30.11.2018 по 29.11.2021 года, выданного ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (оттестирована аккредитация РОСС RU.151539.041830.001).

Регистрационный номер декларации на медицинское изделие № ФСР 2009/06387 от 12.11.2015 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

Дата принятия декларации 11.12.2018  
 Декларация о соответствии действительна до 10.12.2023


М.П.  А.В. Костров

Сведения о регистрации декларации о соответствии:  
 Основной государственный регистрационный номер: 1107746918510.  
 Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испытаний»

117420, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, офис 900  
 Телефон +7(499) 679-34-34, факс +7(499) 678-20-84, адрес электронной почты info@mercis.ru  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11.AG82 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 04.09.2015 года, выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации 11.12.2018, регистрационный номер декларации РОСС RU Д-РУ.АГ82.В.00709/18

М.П.  Ш.Н. Рузicka

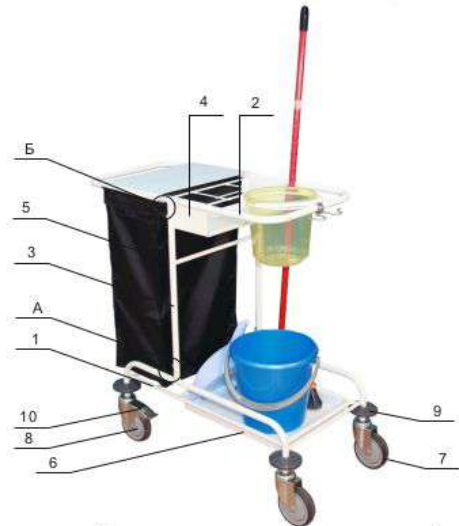

1 - основание; 2 - скоба; 3 - рама; 4 - ёмкость; 5 - пакет; 6 - съёмный лоток;  
 7 - колесо без тормоза; 8 - колесо с тормозом; 9 - амортизатор; 10 - педаль.

Рисунок 1

## 6. Консервация

6.1. Металлические детали тележки должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 для условий хранения 2°С с сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877).

6.2. Тележка для уборки помещений ТУП подвергнута в АО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и технически условиям ТУ 9451-031-07614107-2005.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

## 7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование тележки должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

7.2. Товар должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 8. Сведения об утилизации

Поскольку тележка не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

## 9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.

9.2. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и техническим условиям ТУ 9451-031-076.14.107-2005.

9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.

9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

## 10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

10.1. Истечение гарантийного срока.

10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.

10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.

10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.

10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.

10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

**ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

## 11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:

- наименования товара;

- даты ввода товара в эксплуатацию;

- описания дефекта товара и характера неисправности;

- обстоятельств выявления дефекта;

- контактной информации ответственного лица.

2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.

3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту [welcome@dzmo.ru](mailto:welcome@dzmo.ru).

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.





### Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

### Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.

### Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
  - наименования товара;
  - даты ввода товара в эксплуатацию;
  - описания дефекта товара и характера неисправности;
  - обстоятельств выявления дефекта;
  - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона (с голограммой).
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту [welcome@dzmo.ru](mailto:welcome@dzmo.ru).

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

### 12. Свидетельство о приемке

Тележка для уборки помещений	ТУП	<input type="text"/>
Наименование изделия	Обозначение	
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.		
Служба качества	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		
подпись		
_____		
расшифровка подписи		
_____		
число, месяц, год	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сборщик / упаковщик	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ООО "МедКомплекс "А.В.К."



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок и голограммы производителя

Наименование товара	<b>ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ ТУП</b>		
Серийный номер		Дата производства	
Гарантийный срок	<b>12 месяцев</b>	со дня продажи	

#### Заполняет продающая организация

Наименование продающей организации		
Дата продажи		
ФИО / Подпись		

#### Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.  
К комплектации и внешнему виду товара претензий не имею.

Наименование покупателя		
ФИО / Подпись		

