

КРОВАТЬ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КМ-03 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Медицинские кровати с механической регулировкой секций предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения за пациентом в стационарных медицинских учреждениях, и в домашних условиях.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: кровать общебольничная, руководство по эксплуатации, инструкция по сборке.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Значение параметров
1. Габаритные размеры (ВхШхГ)	890x905x2055*
2. Количество секций	3
3. Количество регулируемых секций	3
4. Размер нижней секции (ДхШ)	548x820
5. Размер головной секции (ДхШ)	720x820
6. Размер промежуточной секции (ДхШ)	418x820
7. Масса	54 кг

*Размеры указаны без учета бамперов

Отклонение веса указанного в таблице - ±10%

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для продления срока службы кровати рекомендуется производить:

- осмотр подвижных секций (надежность крепления узлов, осей вращения, отсутствие деформаций упорных рамок и самих секций);

- осмотр ножек кровати (надежность их фиксации к раме ложа), проверку надежности крепления спинок.

В случае обнаружения ослабленных соединений – затянуть болты ключом.

Допустимая статическая нагрузка до 150 кг.

Внимание! Для модификации изделия с механизмами «Растомат» не допускается подъем спинной секции на минимальный угол срабатывания растоматов (первое фиксированное положение растомата) для пациентов массой более 100 кг.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Кровать общебольничная может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.

Кровать общебольничная устанавливаются на ровную, горизонтальную поверхность.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Кровать в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется простыми транспортными средствами при температуре -50°С... +50°С.

Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.

Изготовитель не несет ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Кровать изготовлена ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а. Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

КРОВАТЬ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КМ-03 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Медицинские кровати с механической регулировкой секций предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения за пациентом в стационарных медицинских учреждениях, и в домашних условиях.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: кровать общебольничная, руководство по эксплуатации, инструкция по сборке.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Значение параметров
1. Габаритные размеры (ВхШхГ)	890x905x2055*
2. Количество секций	3
3. Количество регулируемых секций	3
4. Размер нижней секции (ДхШ)	548x820
5. Размер головной секции (ДхШ)	720x820
6. Размер промежуточной секции (ДхШ)	418x820
7. Масса	54 кг

*Размеры указаны без учета бамперов

Отклонение веса указанного в таблице - ±10%

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для продления срока службы кровати рекомендуется производить:

- осмотр подвижных секций (надежность крепления узлов, осей вращения, отсутствие деформаций упорных рамок и самих секций);

- осмотр ножек кровати (надежность их фиксации к раме ложа), проверку надежности крепления спинок.

В случае обнаружения ослабленных соединений – затянуть болты ключом.

Допустимая статическая нагрузка до 150 кг.

Внимание! Для модификации изделия с механизмами «Растомат» не допускается подъем спинной секции на минимальный угол срабатывания растоматов (первое фиксированное положение растомата) для пациентов массой более 100 кг.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Кровать общебольничная может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.

Кровать общебольничная устанавливаются на ровную, горизонтальную поверхность.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Кровать в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется простыми транспортными средствами при температуре -50°С... +50°С.

Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.

Изготовитель не несет ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Кровать изготовлена ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а. Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____