

## 6. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

6.1 Транспортировка мебели должна производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.2 Размещение и крепление упаковок с мебелью в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

6.3 Мебель предназначена для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.

6.4 Сохранность и продолжительность эксплуатации мебели зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и в значительной степени, от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Нормальные условия для хранения и эксплуатации мебели – температура воздуха от +10<sup>0</sup>С до +40<sup>0</sup>С при относительной влажности 45-70%.

**Рекомендуется:** удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку дезинфицирующими средствами способом протирания (допускается использование раствора «Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в кол-ве 50г на 10л раствора); периодичность обработки – до 2-х раз в сутки.

**Не допускается:** механическое повреждение деталей мебели и попадание на их поверхность влаги и растворителей; хранение в сырых неотапливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие прямых солнечных лучей.

## 7. Гарантийные обязательства, свидетельство о приемке

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели – 12 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

7.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: истечение срока гарантии; нарушение правил хранения и эксплуатации; наличие механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

Замена фурнитуры и деталей мебели, имеющих дефекты **производственного характера**, осуществляется при предъявлении настоящего гарантийного талона и упаковочных этикеток.

За изделия с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.**

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата выпуска изделия: \_\_\_\_\_

Упаковщик: \_\_\_\_\_

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.

Место производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18


E-mail: [zakaz@tdask.ru](mailto:zakaz@tdask.ru) [www.tdask.ru](http://www.tdask.ru)

ООО Медицинская Компания



## Паспорт

Арт.	Наименование
ША.02.02 (мод.1)	Шкаф для медикаментов (вид 139690)

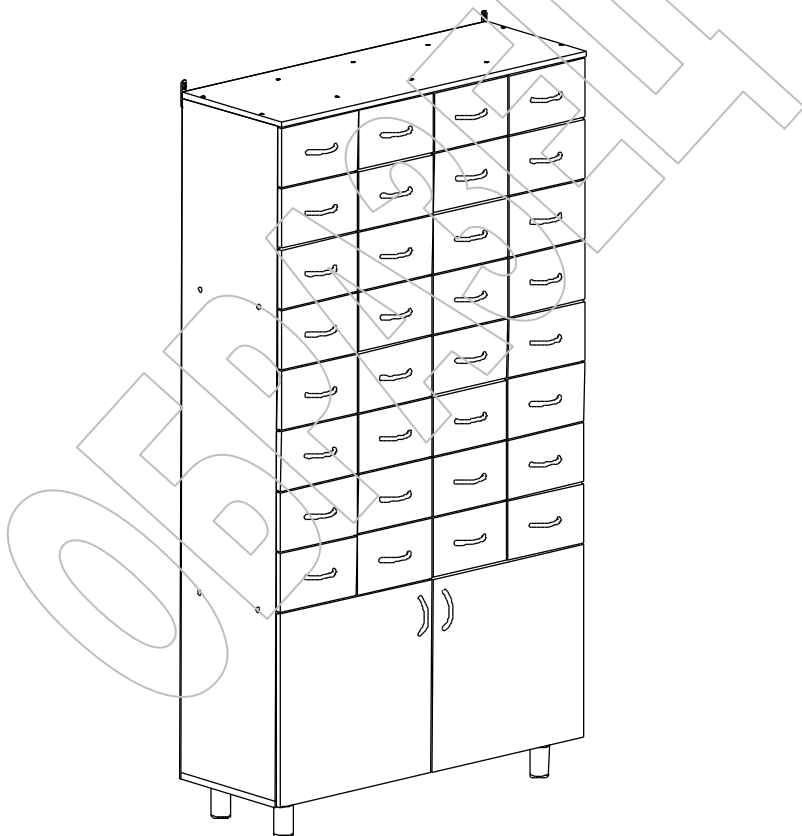

ТУ 9452-003-68690950-2014

г. Нижний Новгород

## 1. Назначение

1.1 Шкаф предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется для хранения медикаментов, документов, карточек пациентов, инструментов и расходных материалов, медицинского инвентаря и аппаратуры.

## 2. Основные технические характеристики

2.1 Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, задняя стенка и днища ящиков – из ДВПО толщиной 3.2 мм. Применяемая мебельная фурнитура позволяет многократную сборку и разборку изделия.

Арт.	Описание	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
		ширина	глубина	высота	
ША.02.02 (мод.1)	Шкаф для медикаментов. Две двери, регулируемые опоры, 32 выдвигаемых ящика.	1040	380	1910	144

## 3. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Шкаф в собранном виде с комплектом фурнитуры для самостоятельной установки	1
Паспорт	1
Упаковка	1

## 4. Сборка шкафа

- 4.1 Шкаф поставляется в собранном виде. Для удобства транспортировки ручки установлены с внутренней стороны дверей; металлические регулируемые опоры и ручки на фасады ящиков – входят в комплектацию шкафа и требуют самостоятельной установки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, рулетку или линейку.
- 4.2 Распакуйте шкаф. Шурупами 4×16 закрепите на днище шкафа метал. рег. опоры. Ручки переставьте с внутренней стороны дверей на лицевую сторону. Установите ручки на фасады ящиков. Установите съёмные полки на полкодержатели.
- 4.3 Установите шкаф на место. При необходимости – регулировкой опор обеспечьте устойчивое положение шкафа. При необходимости – при помощи регулировочных винтов петель отрегулируйте положение дверей. Головки евровинтов закройте заглушками.
- 4.4 **Внимание!** Для предотвращения опрокидывания шкафа – обязательно закрепите шкаф к стене. Шурупами 3.5×30 закрепите на корпусе шкафа плоские подвески. Через проушины подвесок закрепите шкаф крепежом, соответствующим материалу стен (не входит в комплектацию изделия).

## 5. Комплектующая ведомость на фурнитуру

Наименование	Кол.
Заглушка для евровинта	8
Опора рег. h=100	4
Шуруп 4×16	16
Ручка (для фасадов ящиков)	32
Полкодержатель	8
Подвеска плоская	2
Шуруп 3.5×30	4

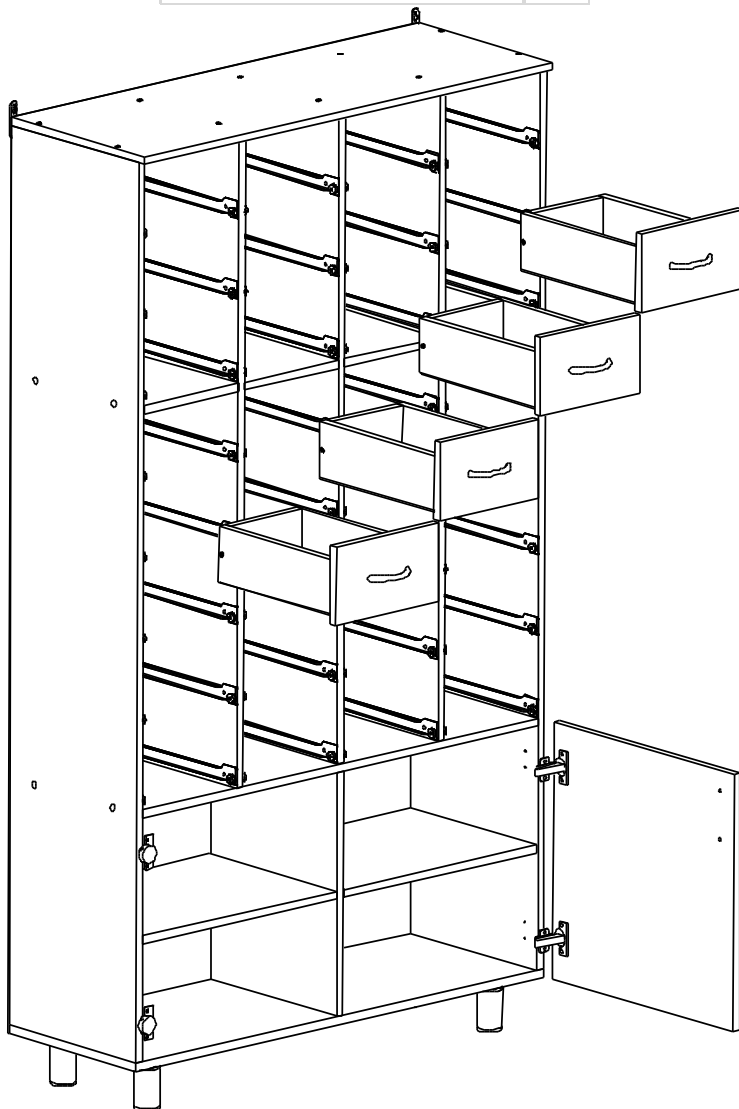


Рис. 1